

■ MC-980A仕様

インピーダンス測定部	測定方式		マルチ周波数8電極方式	
	測定周波数		1kHz / 5kHz / 50kHz / 250kHz / 500kHz / 1000kHz	
	測定電流		90 μA 以下	
	電極材質		脚: ステンレス / ハンドグリップ: ABSメッキ	
	測定部位		全身/右腕/左腕/右脚/左脚	
体重測定部	測定範囲		75.0 - 1,500.0 Ω (0.1 Ω 単位)	
	計量方式		電気抵抗線式はかり	
	型式承認番号		第D111号 精度等級3級	
	ひょう量		300kg (風袋量を含む)	
	目量 (最小表示)		0.1kg	
出力項目	シリアルナンバー		16桁	
	名前		日本語表示対応	
	性別		男性/女性	
	体型		スタンダード/アスリート	
	年齢		6 - 99 才 (スタンダード) / 18 - 99 才 (アスリート)	
	身長		90.0 - 249.9cm (0.1cm 単位)	
	全身	着衣量	0 - 10.0kg (0.1kg 単位)	
		体重	0 - 300.0kg (0.1kg 単位)	
		体脂肪率	1.0 - 75.0% (0.1% 単位)	
		脂肪量	0.1kg 単位	
		除脂肪量	0.1kg 単位	
		筋肉量	0.1kg 単位	
		BMI※	0.1 単位	
		推定骨量	0.1kg 単位	
		タンパク質など	0.1kg 単位	
		基礎代謝量※	0 - 9999kcal (1kcal 単位)	
	部位	内臓脂肪レベル※	1-59レベル	
		体水分量※	0.1kg 単位	
		アスリート指数※	40 - 100 (1単位)	
		筋肉量	0.1kg 単位	
		筋肉量評価※	-4 - +4	
		脂肪率	0.1% 単位	
	ボディファス	脂肪量	0.1kg 単位	
		脂肪率評価※	-4 - +4	
		体型判定※	45段階	
		脚部筋肉量点数※	50-150	
過去履歴		のべ3000名 各100回 (計算値)		
入力項目	着衣量 (風袋量)	0 - 10.0kg (0.1kg 単位)		
	ID	16桁		
	性別	男性/女性		
	体型	スタンダード/アスリート		
	年齢	6 - 99 才 (スタンダード) / 18 - 99 才 (アスリート)		
	身長	90.0 - 249.9cm (0.1cm 単位)		
	目標脂肪率	4-55% (1% 単位)		
	登録ユーザー	着衣量 (風袋量)	0 - 10.0kg (0.1kg 単位)	
		ユーザーID	16桁	
		名前	日本語入力対応	
		性別	男性/女性	
		体型	スタンダード/アスリート	
身長		90.0 - 249.9cm (0.1cm 単位)		
生年月日		YYYY/MM/DD形式		
パスワード	10桁以内			
表示部	10.4型1024x768 TFT カラーLCDタッチパネル			
外部インターフェイス	USB A-タイプ コネクタ x3			
	USB B-タイプ コネクタ x1			
	LAN ポート x1			
	オーディオプラグ (Mic-in, Line-out)			
電源	100V AC (50/60Hz)			
消費電流	0.5A以下			
使用条件	温度範囲	5℃-35℃		
	湿度範囲	30-80% (結露しないこと)		
製品質量	33kg			
生産国	日本			
主な付属品	取扱説明書、保証書、専用印刷台紙200枚、組立ガイド			
メーカー希望小売価格	¥ 2,000,000 (税込 ¥ 2,100,000)			

※17才以下の設定で測定した場合、この項目は表示、印字、出力されません。

⚠ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど体内機器装着の方は使用しないでください。


株式会社 **タニタ** インターネット ホームページ <http://www.tanita.co.jp>

*本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03 (3968) 2111 (代表) FAX03 (3968) 2661
*東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03 (3558) 8111 (代表) FAX03 (3558) 0335
*大阪営業所 〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15 06 (6784) 2811 (代表) FAX06 (6784) 2778
名古屋営業所 〒465-0072 名古屋市長東区牧の原2-707 052 (704) 2201 (代表) FAX052 (704) 2221
福岡営業所 〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6 092 (575) 5761 (代表) FAX092 (575) 5617
北日本営業所 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187 (66) 2144 (代表) FAX0187 (66) 2145

* (株) タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 0187 (66) 2122 (代表)
お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03 (3967) 9655 受付時間 9:00～18:00 (土日祝日を除く)
Copyright© 2012 TANITA Corporation All Rights Reserved
※はISO9001の認証登録事業所

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2012年7月現在のものです。
◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。

■ MC-980A 外形寸法 (mm)

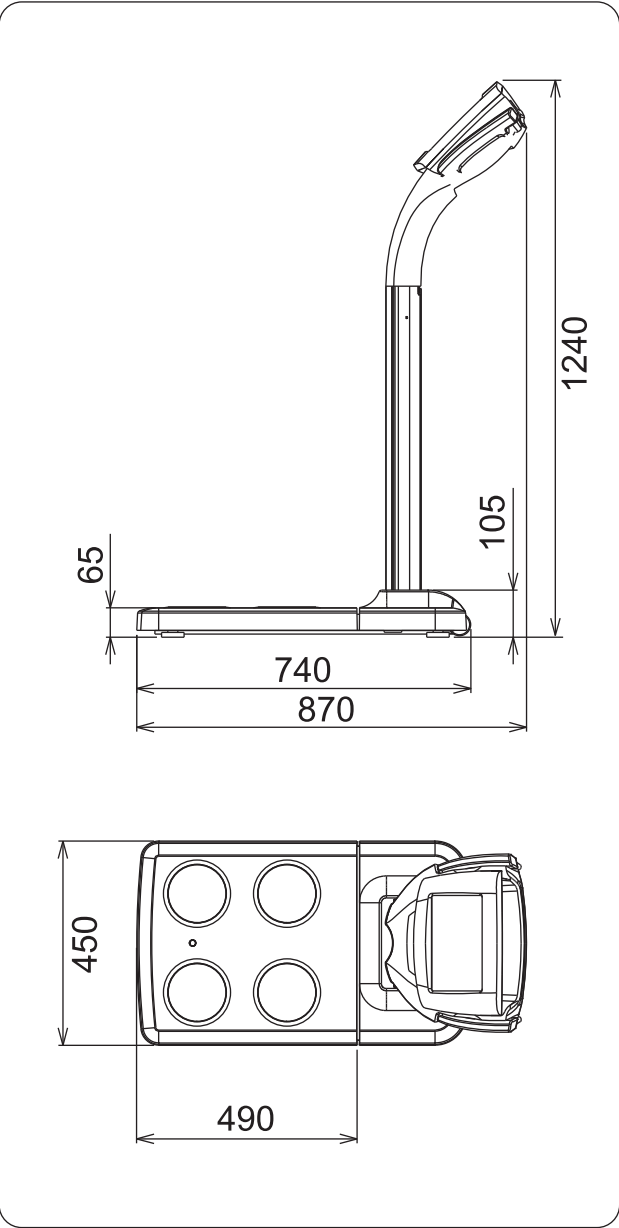

■ MC-980A 専用印刷台紙1箱 (1,000枚 / A4)

品番	MC-980A-01
メーカー希望小売価格	¥ 15,000 (税込 ¥ 15,750)

■ 専用プリンタ GP-700セット

品番	GP-700 MC-980A-09
主なセット内容	本体、交換用インク4色各1本、USBケーブル、変換プラグ
メーカー希望小売価格	¥ 120,000 (税込 ¥ 126,000)



MC980A0811 2012-7-1 10,000-2

TANITA®
健康をはかる

Multi Frequency
Segmental Body
Composition Analyser

MC-980A

体組成計
MC-980A

型式承認取得品
図基準適合証印



MADE IN JAPAN
TANITA



Monitoring Your Health

MC-980A

体組成計研究のパイオニアであるタニタのBIA体組成計は、豊富な臨床試験データに基づいて開発されています。

ホワイト&ネイビー





測定結果が見やすい・分かりやすい

1 全身チェック

測定数値を表示します。

体重

ひょう量300kgなので体格を選ばず多くの方を測定できます。

体脂肪率

体内に占める脂肪組織の割合です。本質的な肥満の判定には体重ではなく体脂肪率が基準となります。

脂肪量

体内に含まれる脂肪分を質量で表しています。

除脂肪量

体重から脂肪量を引いた質量です。

推定骨量

骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラル量を「骨量」と言います。

筋肉量

姿勢を保ったり、心臓を動かしたりする筋肉組織(骨格筋、平滑筋、水分)の質量です。

水分量

血液やリンパ液、細胞間液、内臓内液など体内に含まれる水分量を表しています。

タンパク質など

筋肉量から水分量を引いた質量です。

BMI

「体重/身長(m)²」で計算されます。疾病が少ないのはBMI値22とされています。

※17才以下はBMIは印字されません。また、体脂肪率・脂肪量以外の標準範囲は表示されません。

2 部位の分析

トレーニングの効果指標に役立ちます。

脂肪と筋肉を部位別に分析した値です。部位ごとの数値判定など、プロポーシオン作りや筋力トレーニングに必要な情報を提供します。

※17才以下は測定値のみ表示されます。

3 ボディバランス

筋肉量左右バランスチェック

左右の腕と脚の筋肉量を比較し、バランスをチェックします。

脚部筋肉量点数

体重に占める下肢の筋肉量を指標化し、加齢により衰えやすい脚力を評価します。

※17才以下は表示されません。

4 測定結果の履歴

体組成の変化を分かりやすく表示します。

測定結果のグラフでは、体重、体脂肪率、筋肉量、アスリート指数の履歴(初回値と過去12回分まで)を表示します。目標値の設定がされていると、設定値がグラフ上に表記されるので、測定者のモチベーションの向上にも役立ちます。

※17才以下は体重・体脂肪率・筋肉量のみ表示されます。

5 体脂肪率と筋肉量による体型判定

体脂肪率と筋肉量を考慮した体型判定を行います。

前回値や目標値もプロットされるので、目指している体型も一目瞭然です。

※17才以下は体脂肪率判定のみ表示されます。

TANITA®
健康をはかる

Body Composition Analyzer


MC-980A

測定日時	2012/08/01 17:20	着衣量(PT)	1.0 kg
ID	11234890205		
名前	タニタ 太郎	身長	171.0 cm
年齢	37	体型	スタンダード
		性別	男性



1 全身チェック

	結果	標準範囲	目標値	差
体重	66.4 kg	54.1 - 72.8 kg	69.6 kg	-3.2 kg
体脂肪率	13.0 %	11.0 - 21.9 %	12.0 %	-1.0 %
脂肪量	8.6 kg	7.1 - 16.2 kg	11.8 kg	-3.2 kg
除脂肪量	57.8 kg			
推定骨量	3.0 kg	2.5 - 3.2 kg		
筋肉量	54.8 kg	47.5 - 55.8 kg		
体水分量	41.6 kg			
タンパク質など	13.2 kg			
B M I	22.7	18.5 - 24.9		


4 測定結果の履歴

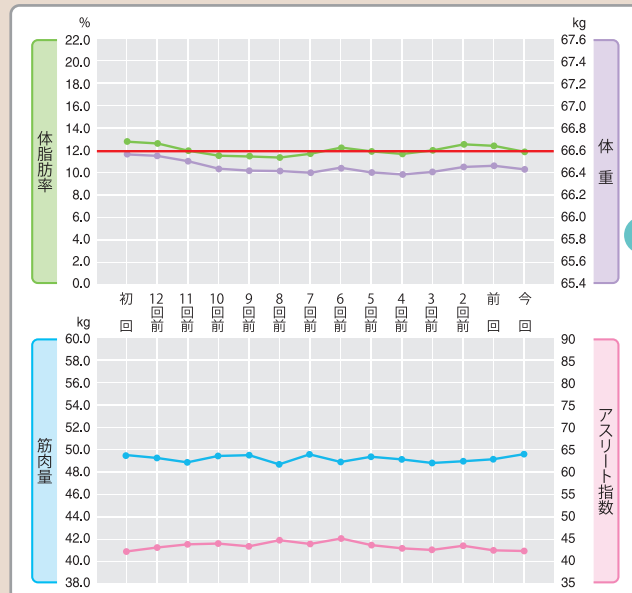



2 部位の分析

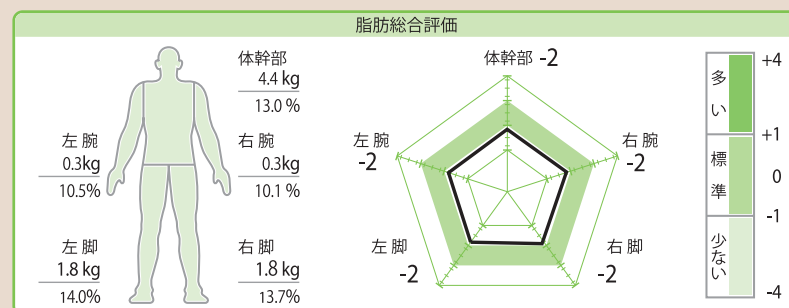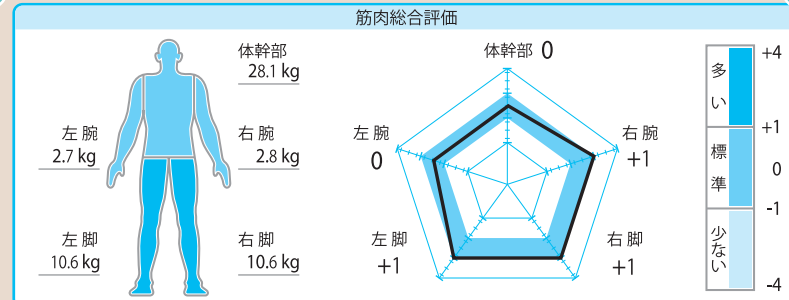


5 体脂肪率と筋肉量による体型判定

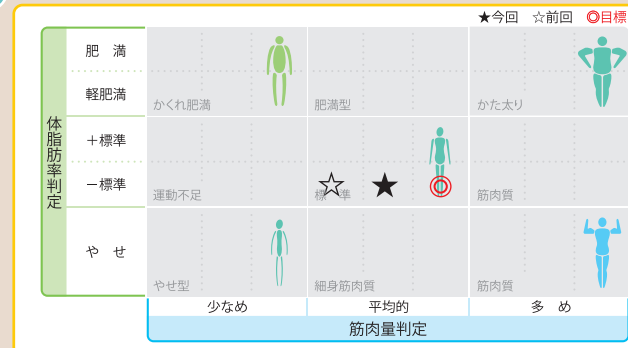

3 ボディバランス

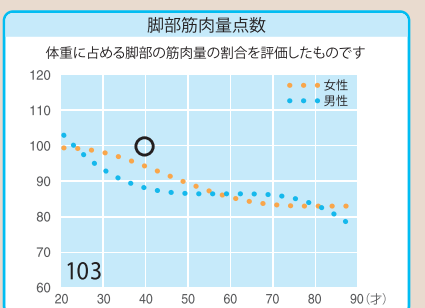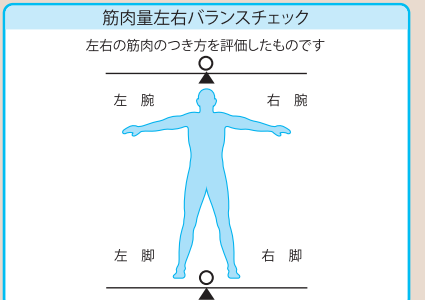

6 BMR、VFR、アスリート指数

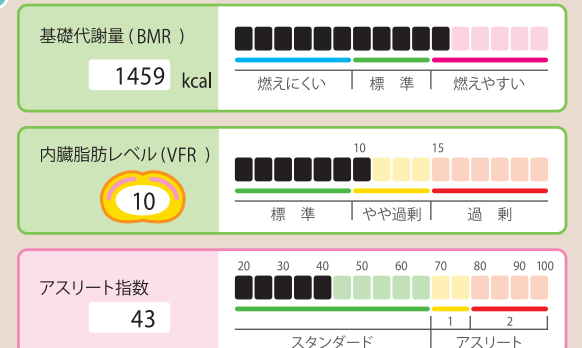

6 BMR VFR、アスリート指数

測定結果を分かりやすくバーで判定します。

基礎代謝量(BMR)

測定者の体組成に基づいた基礎代謝を表示・判定します。

内臓脂肪レベル(VFR)

腹腔内(内臓のまわり)についた脂肪をレベル表示します。

アスリート指数

測定者の体組成がどのぐらいプロスポーツ選手などのアスリートに近いのかを数値化しています。

※17才以下は表示されません。

結果用紙裏面

専用印刷台紙裏面には詳細な解説がありますので、測定結果各項目について容易にご理解いただけます。

