


MC-980A-N plusの設定

体組成計用アダプターを体組成計のUSBポートに接続し、下記の操作を行ってください

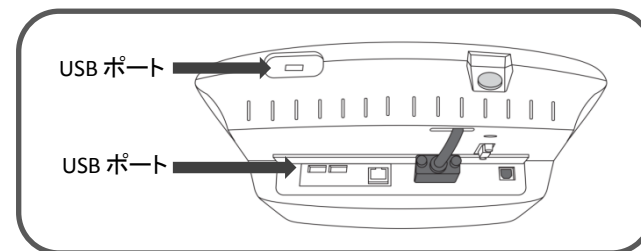


1 初期画面で【設定】を押す




2 パスワードを入力し、【Enter】を押す


工場出荷時のパスワードは「9999」に設定されています

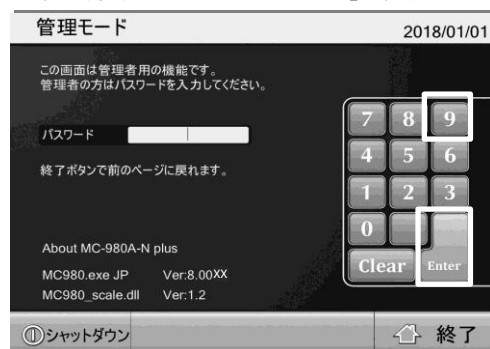

3 【一般設定】を押す

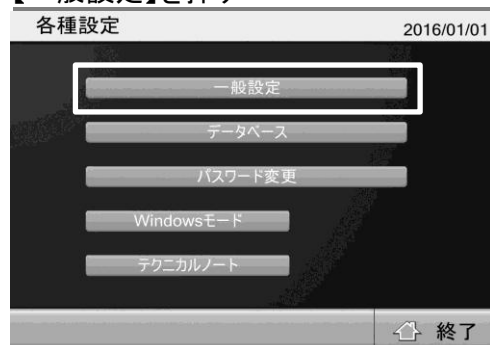

4 【コンピュータとの接続設定】を押す

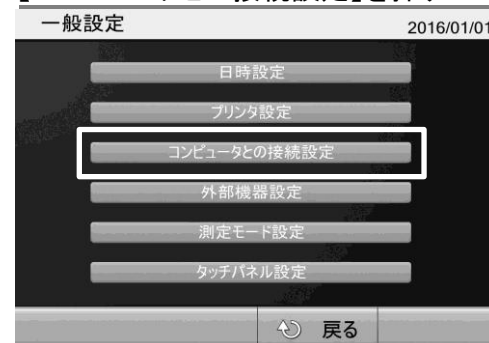


5 フロー制御が【OFF】になっていることを確認する

「ポート出力番号」の【▼】【▲】を押して「OP-102」のCOM番号を選択し、【OK】を押す

※COM番号は状況によって異なりますが、「Default」以外の選択肢が出てきたらそれがOP-102のCOM番号になります

※番号があっているか確認したい場合、WindowsモードでコントロールパネルのデバイスマネージャーのCOM番号を確認してください

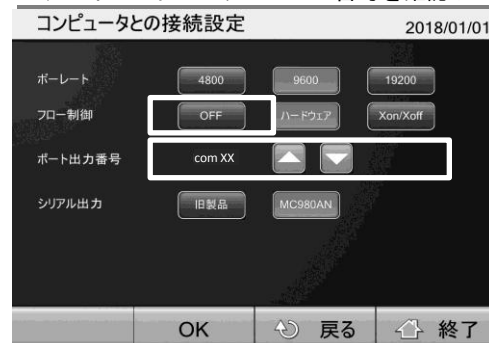

6 初期画面に戻ると、以降「OP-102」からPCと通信を行うようになる