

## ベビースケール (BD-815) 専用ソフトマット BD-8150M 説明書

このマットは、ベビースケール『BD-815』専用のソフトマットです。  
不特定多数の赤ちゃんが使用する際の衛生管理には、マット交換がおすすめです。  
柔軟性があり保温性に優れますので、赤ちゃんの寝心地も抜群です。  
吸水性がなく、安全性・耐久性に優れ、かんでもなめても害はありません。

### ご使用方法

#### 風袋引きしないとき

- ①マットをベビーバスケットの上へのせる
- ②電源を入れる
- ③「0」表示後、赤ちゃんをのせる

※その他の操作方法は、取扱説明書をご覧ください。

※ベビーバスケットを本体に取り付けたり取り外す際は、必ずソフトマットをおろした状態で、取扱説明書・本体シールにしたがって行ってください。

#### 風袋引きするとき

- ①電源を入れる
- ②「0」表示後、マットをベビーバスケットの上へのせる
- ③「ON/風袋」ボタンを押す（風袋引き機能）
- ④「0」表示後、赤ちゃんをのせる

### お手入れ

- ①中性洗剤を薄めた液をスポンジや柔らかい布などに含ませ、汚れを取った後きれいな水で洗剤を洗い流します。
  - ②その後、陰干しか、乾いた布でから拭きしてください。
- 注意) 洗剤の使用後は、充分水洗いして洗剤分が残らないようにしてください。

### ⚠注意

ソフトマットが劣化することがありますので、下記事項は必ずお守りください。

- 熱湯を掛けしないで下さい。
- たわし、研磨剤入りのスポンジなどは使用しないでください。
- 塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾールなどは絶対に使用しないでください。
- 灯油、モーターオイル、機械油、食用油等の油が付着した時は、直ちに洗浄して完全に除去してください。
- 漂白剤は、変色することがありますので使用しないでください。
- ワックス類は使用しないでください。

### 仕様

品番	BD-8150M (ソフトマット)
材質	EVA樹脂発泡体 (酢酸ビニル共重合体)
本体サイズ	340×600×80mm
本体重量	1枚 約80g
製造国	中国



EVA-マット

※燃焼してもダイオキシン類の発生はありません。

※本製品を廃棄する際は、廃棄する各自治体の廃棄物分類方法に従ってください。

株式会社 **タニタ**  
 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌  
 ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp/>

お客様サービスセンター  
 ☎ 0120-133821  
受付時間 / 9:00-18:00 (土・日・祝祭日除く)