

TANITA


健康をはかる

家庭用

デジタルベビースケール

BD-585

取扱説明書 保証書付

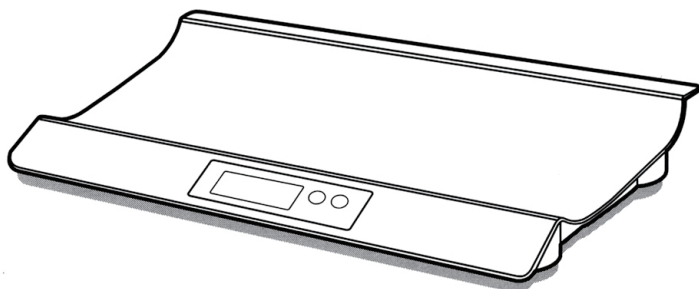

このたびは、デジタルベビースケールをお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

お願い

本器は誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要
なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「人が死亡または重傷を負う恐れのある」内容を表示しています。

⚠ 注意 この表示の欄は、「傷害を負う恐れまたは物的損害が発生する恐れのある」内容を表示しています。

⊘ してはいけない「禁止」内容を示しています。

⚠ 警告

おとなや20kg以上のこどもはベビーバスケットの上にはのらない



禁止




破損してけがをする恐れがあります。

業務用(病院等の施設での測定)には、絶対に使用しない



禁止

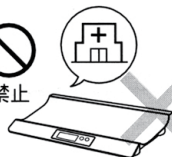


業務用として病院等で使用するための機能を備えていませんので、病院等では絶対に使用しないで下さい。

タイル面やぬれた床など、すべりやすい所には、絶対に置かない



禁止

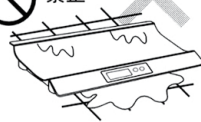

転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがあります。また、本器内部に水が侵入し故障の原因になります。

■ 転倒したり、すべったりして大けがをする恐れがありますので、本器の端にのったり、飛びのったり、跳びはねたりしないでください。

■ 転倒防止のため赤ちゃんをベビーバスケットに、のせたまま放置しないでください。

■ 赤ちゃんの身長を計測するときは、股関節脱臼の原因となる恐れがありますので、足を強く引っ張る等、股関節に無理な力が加わらないようにしてください。

■ 誤作動して正確に測定できない恐れがありますので、携帯電話やマイクロ波治療器などを本器の近くで使用しないでください。

⚠ 注意

■ 表示部にはのらない

破損してけがをする恐れがあります。

■ 隙間や穴に指を入れない

けがをする恐れがあります。

■ 乳幼児には、絶対に持ち運びさせない

落として、けがをする恐れがあります。

■ 乾電池を入れるときは極性(⊕・⊖)の方向を間違えない

液漏れなどで床等を汚損する恐れがあります。

(長期間ご使用にならない場合は、乾電池を本器から取り外す)

精度を保つために

本器は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守って、ご使用ください。

設置について

- 硬く、平らな安定した場所に設置する
畳やじゅうたんの上ではご使用できません(正しい測定ができません)
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
- 温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- 湿度の多い場所や水気のある場所には置かない

取り扱いについて

- 分解や水洗いは絶対にしない
- 過度の衝撃や振動を与えない


収納について

- 振動の激しい所に保管しない
- ONスイッチを押すような方向や場所には立てかけない
※特に収納時にはお気をつけください。乾電池の消耗が早まり故障の原因となります

お手入れについて

- 熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない
汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し「固く絞って」拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

各部のなまえ/付属品

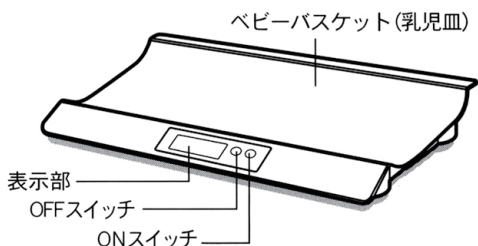


付属品の確認

- 取扱説明書・保証書(本書)
- 単3乾電池(R6P) 4本
- 身長シール
- ※身長シールは、ベビーバスケットに貼るなどして、ご使用下さい。

乾電池の入れ方

- ①本器を裏返しにし、
- ②バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、
- ③乾電池を入れる 単3乾電池R6P(付属)

※パネの先端が、乾電池のマイナス側平面に接触するように乾電池を入れてください。

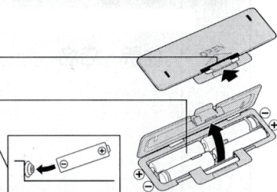

⚠注意

- 乾電池が消耗してくると表示部に「 」を表示します。速やかに新しい乾電池(4本全て)と交換してください(精度の保証ができません)。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対にしないでください。
液漏れなどにより故障の原因になります。
- 充電式の乾電池は使用しないでください。
- 乾電池の寿命は、約1年(1日に5回はかった場合)です。
- 付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- 乾電池の交換時に自動的に電源が入ることがありますので、本器を床の上に置き表示が消えるまで30秒ほどお待ちください。万一、消えない場合は一度乾電池をはずして表示を消してから再び乾電池を入れ直してください。

特長

●オートオフ機能

電源の切り忘れを防ぐため、測定終了後、約5秒で自動的に電源が切れます。
(表示が消えます)

●体重10kgまで、最小10g単位、10kgから20kgまでは、最小20g単位で計測・表示します。

●バスタオルなどをのせ、ONスイッチを押してから測定すると、あらかじめのせたバスタオルなどの重さを差し引いて測定できます。

(測定合計荷重は風袋(バスタオルなど)を含む20kg以内です)


●乾電池が消耗すると、表示部に を表示し、乾電池の交換時期をお知らせします。

ご使用方法

1 ONスイッチを押す




4 体重が確定すると点滅表示する

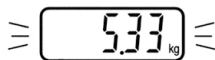


2 表示後



5 赤ちゃんをベビーバスケットからおろす。体重が約5秒間表示する

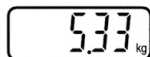

3 kgの表示になったら、赤ちゃんをベビーバスケットにのせる

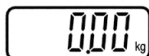

6 測定終了 表示が kgに戻り自動的に電源が切れる

正味体重の測定方法(風袋引)

① バスタオルなどをのせてONスイッチを押す

②  表示後、 kgの表示になったら、赤ちゃんを測定する

※バスタオルなどをのせる場合、測定合計荷重は、風袋(バスタオルなど)を含め20kg以内です。

⚠ はかり方の注意

- 本器は、硬く平らな安定したところでご使用ください。
(畳やじゅうたん等の上では、正しく測定できません)
- バスタオルなどをのせる場合、測定合計荷重は、風袋(バスタオルなど)を含め20kg以内です。
- ONスイッチを押すとき他の部分をさわると **-004** kgなどのマイナス表示する場合があります。再度ONスイッチを押してください。
- **000** kg表示後60秒以内に測定してください。
60秒をすぎて **000** kg表示が消えた場合は、もう一度ONスイッチを押し、はかり直してください。
- 赤ちゃんがはげしく動いている場合は、正確な測定ができません。時間をおいて、もう一度はかってください。

故障かな!?

「故障かな!？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

Err を表示する



- **000** kgが表示する前に測定していませんか？
- 測定中に、赤ちゃんがはげしく動いていませんか？

ONスイッチを押しても
何も表示しない



また **88888** が表示して
すぐ消える

- 乾電池が外れていませんか？
- 乾電池が消耗していませんか？
(残量によっては **L0** も表示しない場合があります)
- 乾電池の電極にビニールやゴミなどがついていませんか？

L0 を表示する



- 乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。

-0L または
マイナスを表示する



- **000** kgが表示する前に測定していませんか？

OL を表示する



- 最大計量(ひょう量)20kgを超えています。
(この場合は測定できません)

体重精度の保証範囲

- 本器は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

10kgまではかる場合	±20g
10kgをこえ20kgまではかる場合	±40g

- 本器は、ご家庭での測定が主な目的ですので業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

仕 様		
型 式	BD-585	
最 大 計 量 (ひょう量)	20kg	
最 小 表 示 (目量)	0～10kgまで10g	10～20kgまで20g
電 源	単3乾電池 (R6P) × 4本	
消 費 電 流	DC6V/最大60mA	

経済省令
適合マーク



総合検査印

総合検査



株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03 (3558)8111(代表)
大 阪 営 業 所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎06 (6784)2811(代表)
名 古 屋 営 業 所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎052(201)6391(代表)
福 岡 営 業 所	〒816-0082 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
仙 台 営 業 所	〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-8	☎022(299)7161(代表)
札 幌 営 業 所	〒007-0834 札幌市東区北34条東22-1-35	☎011(786)5611(代表)

ホームページアドレス

<http://www.tanita.com>

お問い合わせ先

フリー
ダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00～18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町 1-14-2

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - ニ. 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷
 - ホ. 保証書の提示がない場合
 - ヘ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 6.保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

TANITA

保証書

保証書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の
うえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

品名	BD-585		
保証期間	本	体	お買い上げ日より 1年
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () _____		
販売店	住所・店名 _____ (印) 電話 () _____		

株式会社 **TANITA**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

お客様サービス相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-133821