

TANITA[®]

健康をはかる

デジタルベビースケール

取扱説明書

保証書付

BD-586



このたびは、タニタデジタルベビースケールをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

も く じ

ご確認ください

各部のなまえ／付属品	3
安全上のご注意	4
正しいはかりかたとお願い	5

ご使用にあたって

乾電池の入れかた	6
正しい設置のしかた	7
はかる前に（地域設定）	8
使用方法	
体重のはかりかた	9
風袋（TARE）機能のつかいかた	10
前回値の表示	12

必要なとき! ご覧ください


故障かな!?	13
仕様	14
体重精度の保証範囲	14
アフターサービスについて	15
保証書	裏表紙

各部のなまえ／付属品

【表面】



【裏面】

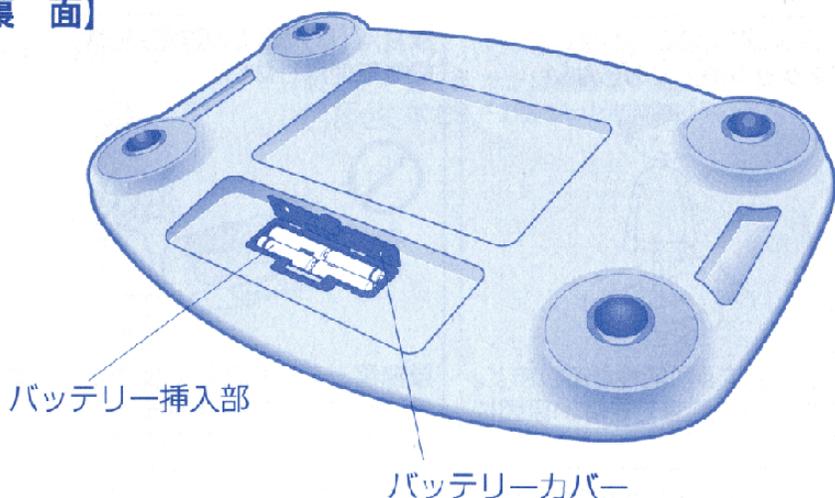

付属品の確認

- 取扱説明書 (本書) 単3乾電池 (R6) 4本
- 身長シール (ベビーバスケットや平らな見やすい場所に貼ってご使用ください)

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を安全に正しくお使いください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、「人が死亡、または重傷を負う可能性のある」内容を表示しています。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性、または物的損害が発生する可能性のある」内容を表示しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容を示しています。

警告

- 転倒したり、すべったりしてけがをする可能性がありますので、本機の端にのったり、飛びのったり、ベビーバスケット上で跳びはねたりしないでください。
- 赤ちゃんの身長を計測するときは、股関節脱臼の原因となる可能性がありますので、足を強く引っ張る等、股関節に無理な力を加えないでください。

注意

おとなや20kg以上のこどもは、
ベビーバスケットの上にはのらない



禁止



破損してけがをする可能性があります。
また故障や正しく測定できない原因になります。

業務用（病院等での測定）には、
絶対に使用しない



禁止



業務用として病院等で使用するための
機能を備えておりません。病院等では
絶対に使用しないでください。

- 赤ちゃんをベビーバスケットにのせたままにしない。
転倒し、けがをする可能性があります。
- 乳幼児には絶対に持ち運びさせない。
落として、けがをする可能性があります。
- 乾電池を入れるときは、極性（ \oplus 、 \ominus ）の方向を間違わない。
液漏れなどで、テーブル、床等を汚損する可能性があります。
（長期間で使用にならない場合は、乾電池を本機から取り外す）

正しいはかりかたとお願い

正確な測定値を得るために

- 携帯電話やマイクロ波治療器などを本機の近くで使用しない
誤作動して正確に測定できない可能性があります。
- 硬く平らな安定した場所で使用する
じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

精度を保つために

本機は、精密に作られています。長く最良の状態を保つため、次のことを守ってご使用ください。

取扱いについて

- 分解や水洗いは絶対にしない
- 過度の衝撃や振動を、与えない
- 直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
- 温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- 湿気の多い場所や水気のある所には、置かない

収納について

- 振動の激しい所に保管しない
 - ON/TAREボタンや前回値ボタンを押すような方向や場所に立てかけない
- ※特に収納時にはお気をつけください。乾電池の消耗が早まり故障の原因となります。

お手入れについて


- 熱湯やベンジン、シンナー等は、使用しない
- 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し
固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。

乾電池の入れかた


①本機を裏返しにし、



②バッテリーカバーの爪を押し上げて開け、

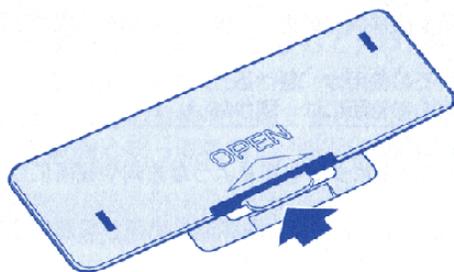

③乾電池を入れる

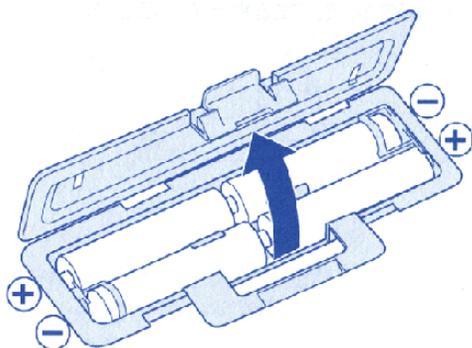

●乾電池が消耗してくると表示部に  を表示します。速やかに新しい乾電池(4本全て)と交換してください。(精度の保証ができません)

注) 故障の原因になりますので、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の併用は絶対におやめください。

注) 充電式の乾電池は使用しないでください。

●乾電池の寿命は、約1年(1日に4回はかった場合)です。

●付属の乾電池は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

●乾電池を取り外しても、メモリーされたデータは消えません。

●乾電池の交換時に自動的に電源が入ることがありますので、本機をテーブル上に置き、OFFボタンを押してください。万一、消えない場合は一度乾電池をはずして表示を消してから再び乾電池を入れ直してください。

●古い乾電池は、お住まいの市町村の廃棄方法に従って処理してください。

単3乾電池R6(付属)

※パネの先端が、乾電池のマイナス側平面に接触するように乾電池を入れてください。




イメージ図

正しい設置のしかた


■硬く、平らな安定した場所でご使用ください。

- 直射日光の当たる場所や暖房機具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない
- 温度変化の激しい場所での使用は、避ける
- 湿気の多い場所や水気のある所には、置かない

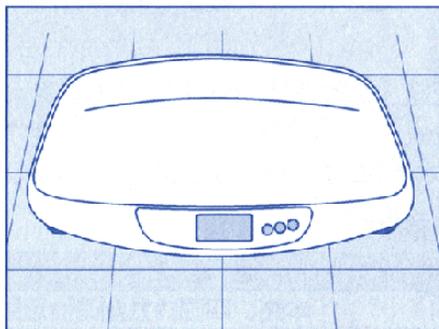

注意

- じゅうたんや、畳の上ではご使用できません
⇒正しく測定できません

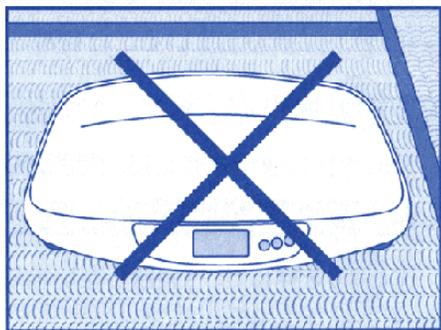

はかる前に — 地域設定

お住まいの地域に合わせて、地域設定をしてください。

高精度のはかりは、使用地域により、重力の影響を受け、測定値に誤差を生じる場合があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

1 乾電池を入れ、**ON TARE** または **前回値** を押す
(♪ピッ)

※乾電池の入れ方は「乾電池の入れかた」(P.6ページ)をご参照ください。

※初めは、「2」(本州、四国、九州)が点滅しています。



地域の番号は次の表を参照してください。

地域 1	地域 2	地域 3
北海道	本州、四国、九州	沖縄

2 現在住んでいる「地域」の番号を設定する

例1：本州、四国、九州(地域2)に住んでいる場合

①「2」が点滅していることを確認し、

② **前回値** を押して、決定 (♪ピピッ)

登録内容が表示された後、電源が切れる。




例2：北海道(地域1)、沖縄(地域3)に住んでいる場合

① **ON TARE** を押して、「登録したい地域の番号 (| または })」を点滅させ、

② **前回値** を押して、決定 (♪ピピッ)

登録内容が表示された後、電源が切れる。

<北海道にお住まいの場合>

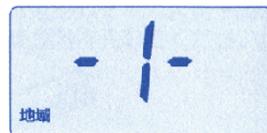

お知らせ

地域設定を間違えたときや引っ越し等によりお住まいの地域が変わったときは、電源がOFFの状態、**ON TARE** を3秒以上押してください。地域設定画面に移ります。

使用方法 — 体重のはかりかた

1 ベビーバスケット上に何ものっていないことを確認し、

ON TARE を押す (♪ピッ)



①約2秒間 **88888** が、点滅表示した後、

② **0.00** kgが表示される (♪ピッ)



2 赤ちゃんをベビーバスケットにのせる



体重が確定すると、表示が固定され、
画面右上の○マークが点灯 (♪ピピッ)

赤ちゃんをベビーバスケットからおろすと約10秒後
電源が切れる。



はかりかたの注意

- 本機は、硬く平らな安定した場所でご使用ください。(畳やじゅうたん等の上では、正しく測定できません)
- バスタオルなどをのせる場合、測定合計荷重は、^{ふくろ}風袋 (バスタオルなど) を含め20kg以内です。
- 重さが0.5kg以上で安定した場合、○マークが点灯し、表示が固定されます。
- 表示が固定し、○マークが点灯した後 **OFF** を押すか、オートオフで表示が消えたとき、直前の表示内容が前回値として記録されます。
- 重さが0.5kg未満の場合は、表示が固定されず、前回値として記録されません。
- 0.00**kg表示時、本体に手やものが触れていると、正しい測定値が得られません。
- 0.00**kg表示後、60秒以内に測定してください。60秒を過ぎて、表示が消えた場合は、再度 **ON TARE** を押してはかり直してください。
- 測定終了後、何も操作せずに約60秒経過した場合、電源が切れます。
- 赤ちゃんがはげしく動いている場合は、正確な測定ができません。時間を置いてもう一度はかってください。

使用方法 — 風袋 (TARE) 機能のつかいかた

バスタオルなどをのせ、**ON TARE**を押してから測定すると、あらかじめのせたバスタオルなどの重さを差し引いて測定できます。

- 1** ベビーバスケット上に何ものっていないことを確認し、**ON TARE**を押す (♪ピッ)

① 約2秒間 **88888** が、点滅表示した後、

② **0.00** kgが表示される (♪ピッ)



- 2** バスタオルをのせる
バスタオルの重さが表示される



- 3** もう一度、**ON TARE**を押す (♪ピッ)

ボタンから指が離れてから約2秒後

0.00 kgが表示される (♪ピッ)



- 4** 赤ちゃんをベビーバスケットにのせる

バスタオルの重さを引いた赤ちゃんの体重のみが表示され、確定すると表示が固定し、画面右上の○マークが点灯 (♪ピピッ)

赤ちゃんをベビーバスケットからおろすと約10秒後電源が切れる。



お知らせ

- 測定合計荷重は、^{ふうたい}風袋（バスタオルなど）を含め20kg以内です。
- 重さを表示中  を押すと、直前の表示内容は前回値として記録されません。
- 測定を中止したいとき、または表示を消したいときは、
 を押してください。強制的に電源が切れます。
- 重さが0.5kg以上で安定した場合、○マークが点灯し、表示が固定されます。
- 表示が固定し、○マークが点灯した後  を押すか、オートオフで表示が消えたとき、直前の表示内容が前回値として記録されます。
- 重さが0.5kg未満の場合は、表示が固定されず、前回値として記録されません。
- 測定終了後、何も操作せずに約60秒経過した場合、電源が切れます。

使用方法 — 前回値の表示

測定後、**前回値**を押すと、前回測定した体重と比較することができます。

1 ベビーバスケット上に何もっていないことを確認し、

ON TAREを押す (♪ピッ)

① 約2秒間 **88888** が、点滅表示した後、

② **0.00** kgが表示される (♪ピッ)



2 赤ちゃんをベビーバスケットにのせる



体重が確定すると表示が固定され、画面右上の○マークが点灯 (♪ピッ)



3 **前回値**を押す (♪ピッ)

前回の体重と今回と前回の体重差を、3回交互表示し電源が切れる



お知らせ

■「前回の体重」と「今回と前回の体重差」を交互表示している時、

前回値を押すと、今回の体重が表示されます。

■電源がOFFの状態では**前回値**を押すと、前回記録された体重のみを表示します。

■初めて測定した場合は、**前回値**を押しても何も表示されません。

故障かな!?

「故障かな!?’と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症状	ご確認ください	ページ
ボタンを押すと、地域設定画面 123 になる	● 地域を設定してください	P.8
 ボタンを押しても、何も表示しない	● 乾電池が、外れていませんか? ● 乾電池が、消耗していませんか? ● 乾電池の電極に、ビニールやゴミなどがついていませんか?	P.6
Lo を表示する	● 乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。	P.6
表示部の文字などを表示した後、すぐ消える	● 乾電池が消耗しています。速やかに交換してください。(乾電池の残量によっては Lo も表示しない場合があります)	P.6
測定中に OL を表示する	● 最大計量 (ひょう量) 20kg を越えています。(この場合は、測定不可)	P.14
測定中に -0.0 kg を表示する	● 000 kg が表示される前に、ベビーバスケット上に何かのせていませんか? ● 000 kg が表示される前に、本機にさわっていませんか?	P.9 P.10 P.12 P.14
測定中に -0L kg を表示する	● 000 kg が表示される前に、ベビーバスケット上に何かのせていませんか?	P.9 P.10 P.12 P.14
 ボタンを押すと、 ErrF を表示する	● はかる前に、ベビーバスケット上に何かのせていませんか?	P.9 P.10 P.12

仕 様

型 式	BD-586
最大計量(ひょう量)	20kg
最小表示(目量)	0~10kg迄 10g 10~20kg迄 20g
電 源	DC6V 単3乾電池(R6)×4本
電池寿命	約1年(1日4回使用の場合)
消費電流	最大60mA
本体寸法	D390×W580×H93mm
本体質量	約2.2kg(乾電池含む)
主な材質	ABS樹脂
製 造 国	中国

■体重精度の保証範囲

- 本機は、計量法に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。

なお、ご使用の場合、はかれた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

10kgまではかる場合	±20g
10kgをこえ20kgまではかる場合	±40g

- 本機は、ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

アフターサービスについて

1、保証書について

保証書は、この取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げより1年間です。

2、修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上、保証書を添えて本機をお送りください。お客様の個人情報につきましては、弊社個人情報保護方針に基づき正確かつ安全に取り扱います。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3、ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。



経済省令適合マーク

株式会社 **TANITA**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒465-0072 名古屋市長区坂の原2-707	☎052(704)2201(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎0187(56)2144(代表)

ホームページアドレス

<http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

保証書

販売店様へ

ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

お客様の個人情報は修理完了品の発送に使用させていただき、修理品と共にご返却いたします。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任をもって管理いたします。

品名	BD-586		
保証期間	本体 お買い上げより1年		
お買い上げ日	年	月	日
販売店	住所・店名		印
	電話	()	
お客様	ご住所		
	お名前		様
	電話		

<無料修理規定>

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- ご購入品等で本保証書に必要な事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶の搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - 保証書の掲示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。