


⚠ 注意

- 作業は必ず2人以上で行ってください。
- 本機は重いので足の上などに落とさないよう十分気をつけて作業してください。


ポールセット (表示部、測定部を含まないご注文) の部品内容

- | | | |
|------------|----------|------------------------------|
| ・ポール | ・ポール受け板 | ・六角レンチ |
| ・コントローラ載せ板 | ・台座 | ・ネジA：六角穴付きボルト (M5 L 12) 12本 |
| ・ポールカバーA | ・ポールカバーB | ・ネジB：十字穴付きナベネジ (M4 L 20) 6本 |
| ・ナイロンクランプ | ・ポール溝カバー | ・ネジC：十字穴付きバインドネジ (M4 L 8) 1本 |

1 測定台裏面に台座をネジBで取り付ける。

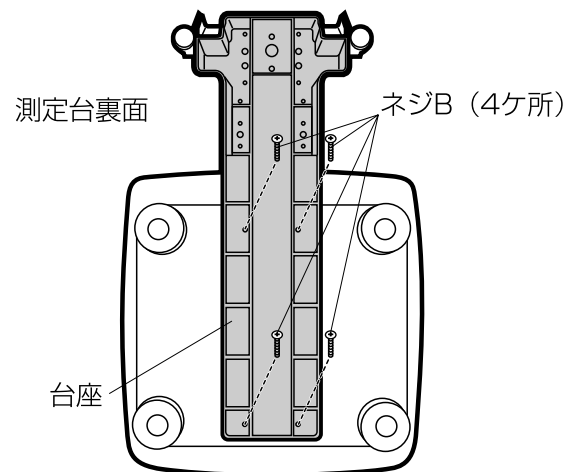


2 ナイロンクランプでコードを挟み、台座に取り付ける。

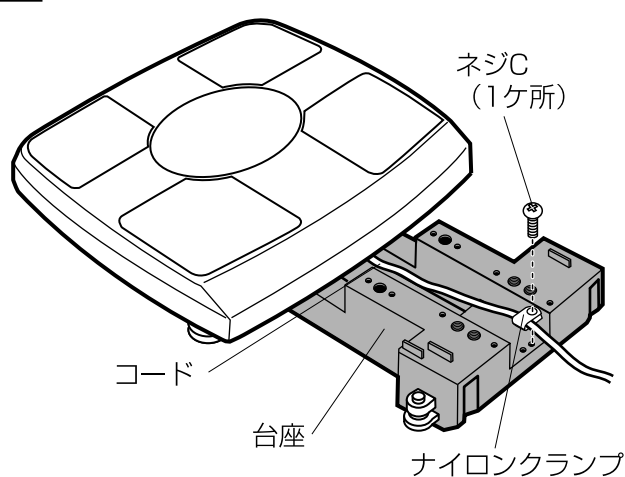


3 ポール底にネジAで、ポール受け板を取り付ける。

△ポール受け板は、切込みが短い方が前にくるように取り付けてください。

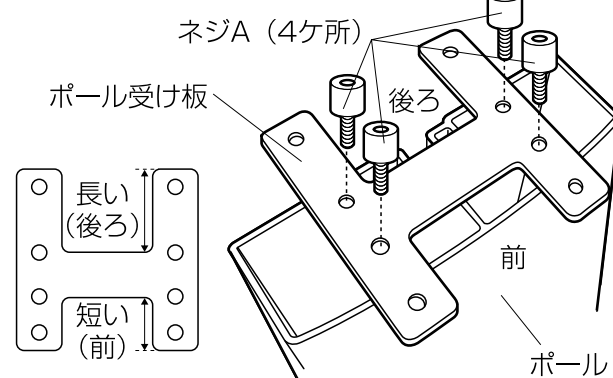


4 突起Aにポールを合わせ立て、測定台とポールのネジ穴を合わせ、ネジAでポールを取り付ける。


△コードは背面に出るように取り付けてください。

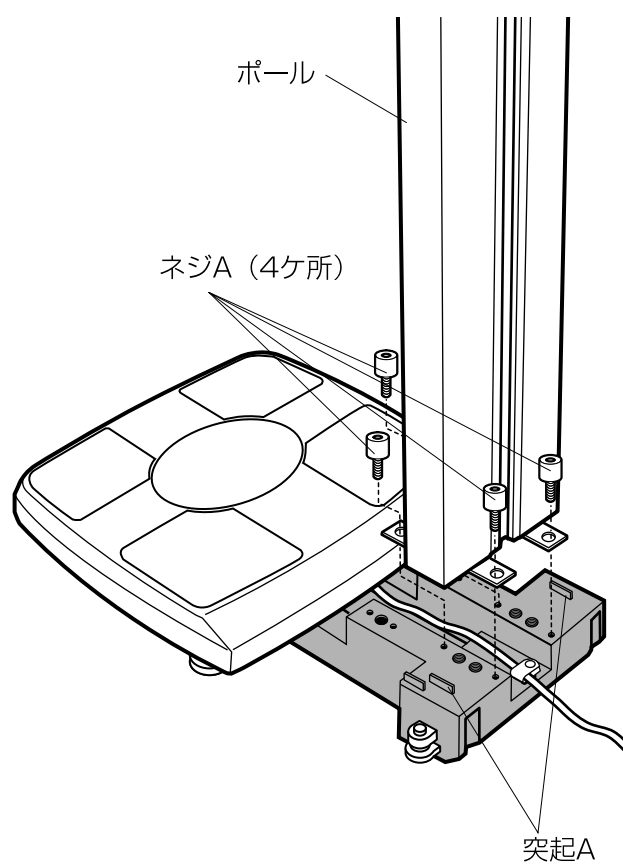


5 ポールにネジAで、コントローラ載せ板を取り付ける。

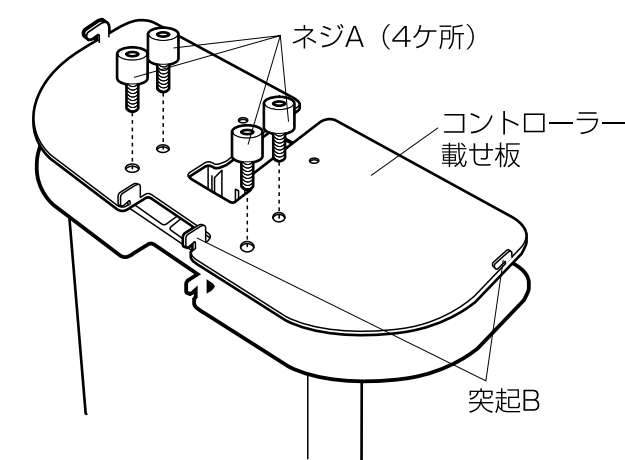


6 コントローラ裏面のネジを外し、表示カバー下面蓋を取り外す。

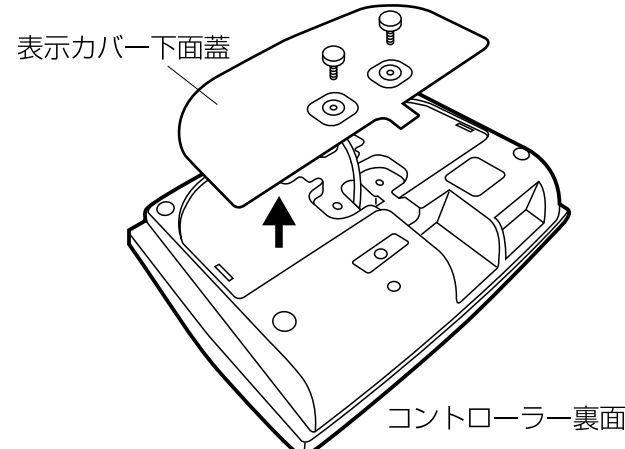

7 コントローラ載せ板の突起Bをコントローラ裏面の差し込み穴に入れ、矢印の方向にスライドさせて固定すし、コントローラ載せ板のネジ穴とコントローラのネジ穴を合わせ、下からネジを取り付ける。

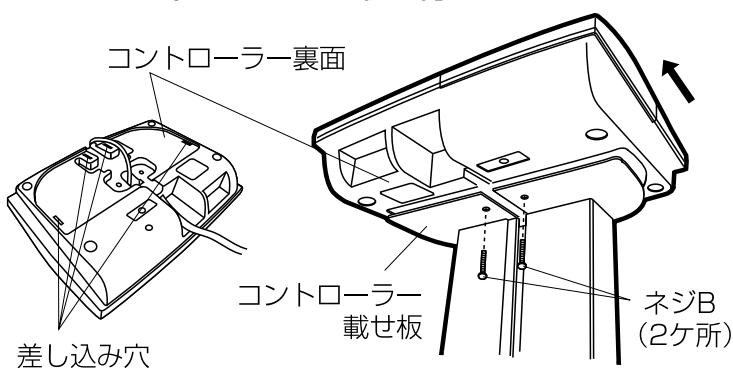


8 ポールの溝内にコントローラと測定台を繋ぐコードを、上方から順に格納する。下方に余ったコードは、折り返して全て格納する。

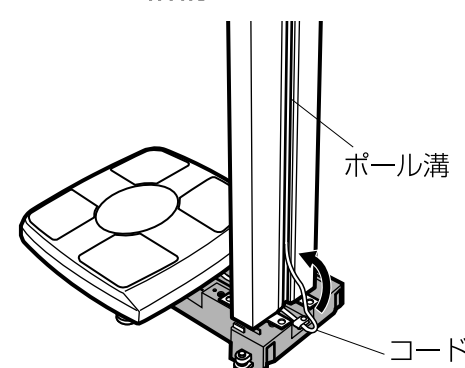


9 ポール溝カバーを上方より取り付ける。


△コードが挟み込まれないように注意してください。

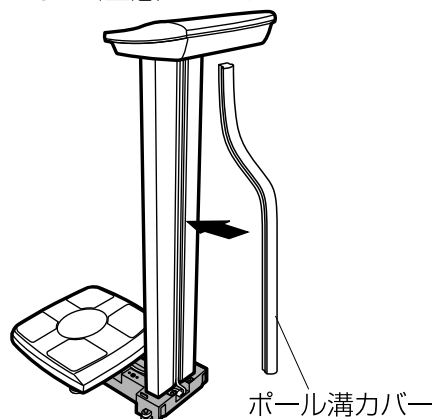

10 ポール背面からポールカバーBを台座の上に取り付ける。

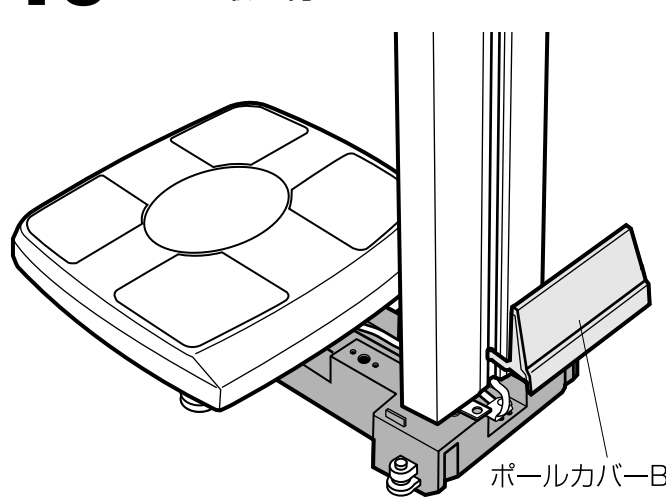

11 ポールカバーAにある差し込み歯を測定台の下に引っ掛け、後ろ部分をそのまま降ろしポールカバーAにスライドさせて入れ、カチッと音がするまで上から押す。

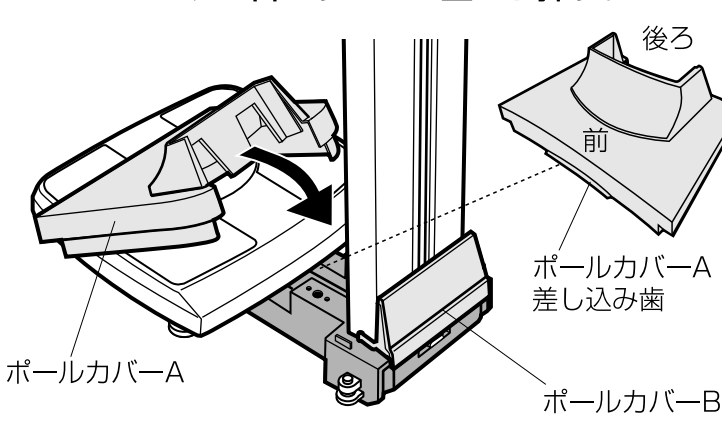

●カバーを外したいときは、裏面の『ポールカバーの外し方』をご覧ください。