

TANITA®

健康をはかる

3Dセンサー搭載歩数計 FB-731 取扱説明書

保証書付

お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになられたあとも、いつでも見られるように保管してください。

もくじ

安全上の注意	1
取り扱い、保管、お手入れについて	2
各部の名称	3
電池を入れる	4
電池を交換する	5
正しくご使用いただくために	6
装着する	7
測定する	8
結果を見る	8
リセットする	9
ストラップの付け方・クリップの使い方	10
こんなときは	11
主な仕様	12
アフターサービスについて	13
保証書	





株式会社 **TANITA**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
お客様サービス相談室
フリーダイヤル ☎ 0120-133821

2010.04 (GN) (1)

安全上のご注意

この説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明しています。

 警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性のある」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される」内容です。
 禁止	してはいけない「禁止」内容です。
 必ず守る	必ず守っていただく内容です。
お願い	製品を最良の状態を保つために守っていただきたい内容です。
お知らせ	製品の使用点検に関連して、お客様に知っていただきたい補足事項です。

警告



禁止

- 電池や製品を乳幼児の手の届くところにおかない
→誤飲の可能性があります。

- 電池は火中に投じない
→破裂する可能性があります。



注意



必ず守る

- 日頃より運動に慣れていない人は、医師やトレーナーの指示に従う
→急な運動や無理な運動は危険です。
- けがや病気で治療中の人は、医師やトレーナーの指示に従う
→急な運動や無理な運動は危険です。

取り扱い、保管、お手入れについて

■取り扱いについて



禁止

- 絶対に分解しない
→故障の原因になります。
- 過度の衝撃や振動を与えない
→故障の原因になります。



必ず守る

- 本体をズボンのうしろポケットに入れない
→破損してけがをする可能性があります。
- 湿気の多い所や水のかかる所で使用しない
→故障の原因になります。
- ストラップなどを持って振り回したりしない
→当たってけがをする可能性があります。
→破損する可能性があります。
- ストラップを使い、首から下げる際はストラップが引っぱられたり、引っ掛からないようにする
→けがをする可能性があります。

■保管について



必ず守る

- 湿気の多い所や水のかかる所に保管しない
→故障の原因になります。

■お手入れについて




必ず守る

- アルコールや熱湯、シンナーやベンジンなどは使用しない
→本体の汚れは、柔らかい布で拭いてください。

各部の名称

〔表面〕


表示部

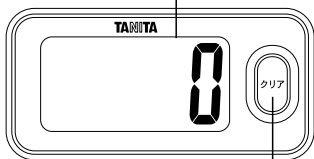

クリアボタン

〔裏面〕

ストラップ取り付け部

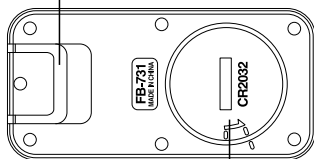


電池フタ

付属品


- 取扱説明書 (本書)
- ストラップ
- お試し用電池 (CR2032×1個)

※お試し用電池のため、
6ヶ月以内に電池寿命が
切れることがあります。

電池を入れる

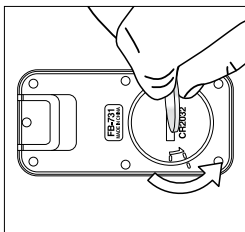


- ①電池フタの溝へコインをあわせ、矢印の方向に回す
※電池フタが自然と浮き上がるまで回してください。

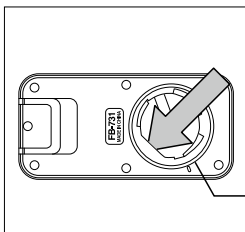


- ②電池 (CR2032) を+側を上にして、矢印の方向から先に入れる。

内部リングが外れた場合、もとに戻してください。

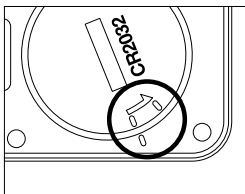


- ③電池フタをマークの位置に注意しながら、図のようにはめる。

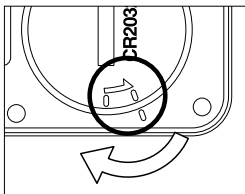


- ④電池フタを矢印の方向にしっかりと締める。

電池を交換する

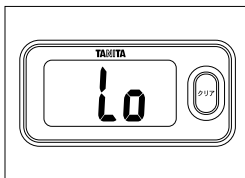

画面に「Lo」と表示されると、測定ができません。

新しい電池(CR2032)に交換してください。

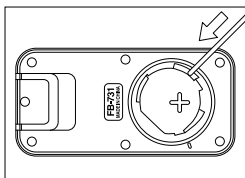

図の部分に細い棒を入れて持ち上げると、電池が取り出しやすくなります。

※電池フタの開閉、電池を入れ方はP4を参照してください。

警告



禁止

●電池は乳幼児の手の届くところに置かない

→誤飲の恐れがあります。万一、電池を飲み込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
真夜中など、お近くの医師に相談できない場合は、下記へ電話して指示を受けてください。

毒性等に関するお問い合わせ先
(財)日本中毒情報センター中毒110番
(大阪)072-727-2499(24時間対応)

※古い電池はお住まいの市町村区の廃棄方法に従って処理してください。

正しくご使用いただくために

次のような場合、正確に測定できない可能性があります

平地での歩行動作が基本です。

●本器が不規則に動くとき

例：●カバンや首からさげていたときの体などにぶつかって不規則にはねる動き

●カバンやポケットの中で本器が不規則に動く

●不規則な歩行をしている場合

●すり足のような歩き方(雪道など)

●サンダル、ゾウリなどの履物での歩行

●混雑した街中を歩くときなどの歩幅の乱れ

●歩行以外のスポーツや、振動の多い所での使用

●階段や急な斜面での昇り降り


●乗り物(電車・バス・自転車・自動車など)でのゆれ

●立ったり座ったりの動作

●ジャンプやジョギングなどの運動、スポーツの時



装着する

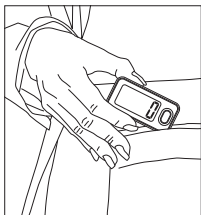


ポケットに入れる

注意

本体をズボンのうしろポケットに入れないうでください。破損してけがをする可能性があります。

落下防止のためクリップをポケットのふちにつけることをおすすめします。

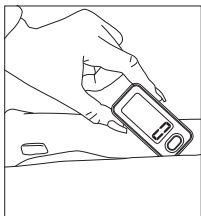

カバンやバッグに入れる

カバンやバッグの中で本器が不規則に動かないようにしてください。



首からさげる

市販のひもやストラップなどに取り付けてご使用ください。

注意 付属のストラップは落下防止のためのものです。本体を腰やバックにぶら下げないでください。

測定する

- 本体を装着して測定してみましょう。

歩数などの測定について

- 本器では誤測定を防止するため、歩行の始まりを判断しています。

⇒7秒以上の一定した動きであれば、歩行と判断し、それまでの測定値を一度に表示します。また、動作をいったん止めた場合、再度7秒以上の一定した動きがないと測定値は加算されません。


※本器には省電力モードがついていますので、約5分以上動きを感知しない場合は何も表示されなくなります。動きを感知すると、またはボタンを押すと「HELLO」が表示された後、「歩数」表示になります。

注意

- 湿気の多いところや水のかかる所で使用しないでください。

⇒故障の原因となります。

結果を見る

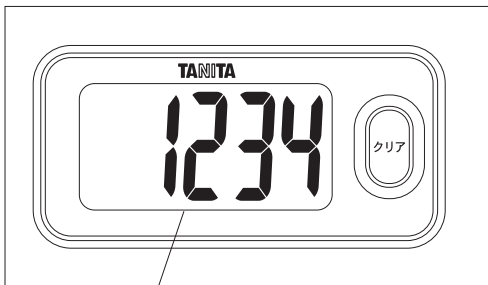


歩いた歩数を表示します。

最大99999歩まで計測できます。

99999歩を超えると表示は動かなくなります。


歩数を0に戻す(リセットする)

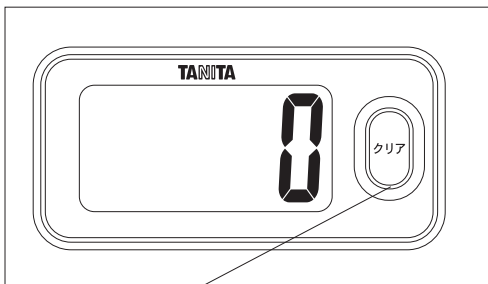

クリアボタン


約3秒長押しすると、0に戻ります。

ストラップの付け方

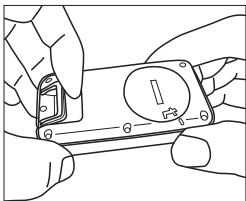

図のように、指をかけ、「ストラップ取り付け部」を出す


注意：開閉する際は、指など挟まないように注意してください。
→けがをする可能性があります。

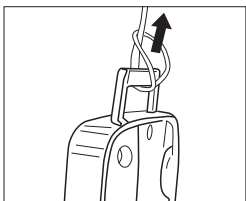


本体とストラップの取り付け方

※ストラップを強く引っ張らないでください。伸びたり、切れることがあります。

クリップの使い方

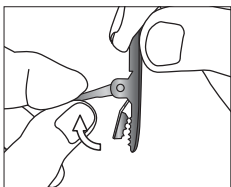

①クリップの開き方
図のように、クリップの長いつめを引き上げます。

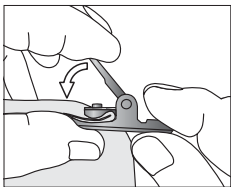

②クリップの閉じ方
図のように、布などはさみ、クリップの長いつめを閉じます。
※クリップをはさんだまま、強く引っ張らないでください。はさんだ布地などをいためる場合があります。

こんなときは

L _o 表示が でた	電池の残量がなくなりました。 計測できません。新しい電池（CR2032）と交換してください。本書P4、P5参照
電池を入れたのに何も 表示しない	電池の向きはあっていますか？電池の⊕⊖の向きをお確かめください。 本書P4、P5参照
	電池が消耗しています。速やかに新しい電池（CR2032）と交換してください。 本書P4、P5参照
測定された 値が少ない／多い	正しく装着していますか？ 本書P6、P7参照
	不規則な歩行の場合の値において測定しません。 本書P6、P7参照
Err マーク が表示	電池を入れ直してください。 本書P4、P5参照

主な仕様

検出方法	3軸加速度センサー
表示方法	LCD表示
表示内容	歩数 最小：1歩 最大：99999歩
歩数精度	±5%（振動試験器による）
電 源	DC3.0V（CR2032／1個）
電池寿命	約6ヶ月 （1日約4時間作動した場合）
使用温度	0～+40℃
外形寸法	D12×W72.5×H35.5 （収納時）
質 量	約28g（電池を含む）
主な材質	本体：ABS 透明レンズ：PMMA ストラップ取り付け部： 亜鉛＋クロムメッキ
生産国	中国

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼される時

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、保証書を添えて本器をお送りください。
- 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理品送り先

(株)タニタ秋田 サービスセンター

〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

3. ご不明な点はおお客様サービス相談室にお問い合わせください。

©2010 TANITA Corporation. All Rights Reserved.

株式会社 **タニタ**

本社・東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	☎ 03(3558)8111(代表)
大阪営業所	〒577-0013 東大阪市長田中1-3-15	☎ 06(6784)2811(代表)
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-19-20	☎ 052(201)6391(代表)
福岡営業所	〒812-0882 福岡市博多区麦野4-2-6	☎ 092(575)5761(代表)
北日本営業所	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1	☎ 0187(66)2144(代表)

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル



0120-133821

受付時間 / 9:00~18:00 (土・日・祝祭日は除く)

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客さまサービス相談室にご連絡の上、商品と保証書をお送りください。
 3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客さまサービス相談室へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
 - 二. 保証書の提示がない場合
 - ホ. 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 6. 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保証書

販売店様へ _____
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ _____
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。

※お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却致します。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、当社規定に基づき、責任を持って管理致します。

品名	3Dセンサー搭載歩数計 FB-731		
保証期間	本体 お買い上げ日より1年		
お買い上げ日	年	月	日
販売店	ご住所・店名		Ⓜ
	電話	()	
お客様	ご住所		様
	お名前		
	電話	()	