

体組成計

取扱説明書

FS-101



本書に記載されているイラストは全てイメージ図です。

このたびは、体組成計をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。毎日の健康管理にお役立てください。

お願い

誤った使い方をしますと重大な事故につながります。この説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

保証書		
販売店様へ		
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。		
お客様へ		
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社に修理をご依頼ください。お客様の個人情報、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。		
品名	体組成計 FS-101	
保証期間	本体 お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所	様
	お名前	
	お電話 ()	
販売店	店名・所在地	Ⓜ
	電話 ()	



経済産業省令
適合マーク

輸入元
TANITA Corporation
〒174-8630 東京都板橋区前野町11-14-2



0570-099655(有料)
ナビダイヤル。受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土・日・祝祭日は除く)

サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添2-1

1. 安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を正しくご使用ください。

	警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
	注意	この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容です。
	禁止	してはいけない「禁止」内容です。
	必ず守っていただく	内容です。

警告

	警告	ペースメーカーなど、 医用電気機器を装着されている方は絶対に使用しない 本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器が誤動作し、重大な事故が発生するおそれがあります。
	注意	測定結果は、決して自己判断しない (測定値の評価、それに基づく運動メニューなど) 自己判断による減量や運動療法は健康を害するおそれがあります。必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。
	禁止	本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない 転倒したり、ずべったりして大けがをすおそれがあります。
	注意	タオル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しない 転倒したり、ずべったりして大けがをすおそれがあります。また、本機内部に水が浸入し故障するおそれがあります。
	注意	物を落としたり、強い衝撃をあたえたりしない ガラスが破損し、けがをすおそれがあります。
	注意	本機や電池を加熱しない 本機の変形や電池の発火によりけがや火災のおそれがあります。

注意

	注意	表示部や操作部の上に乗らない 転倒したり、破損してけがをすおそれがあります。また、故障のおそれがあります。
	注意	隙間や穴に指を入れない けがをすおそれがあります。
	禁止	充電式電池を使用しない 公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本機の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障するおそれがあります。必ず指定の電池を使用してください。
	禁止	新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない 液漏れや発熱、破裂により、本機の故障、けがなどのおそれがあります。
	禁止	乳幼児には、絶対に持ち運びさせない 落として、けがをすおそれがあります。
	注意	業務用（病院などでの測定）には、絶対に使用しない 業務用として病院などで使用するための機能を備えておりませんので、病院などでは絶対に使用しないでください。

	注意	熱湯やベンジン、シンナーなどは、使用しない 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
	注意	分解や水洗いは絶対にしない 本機の損傷や故障のおそれがあります。
	注意	過度の衝撃や振動を与えない 本機の損傷や故障のおそれがあります。
	注意	以下の場所で本機を保管したり使用したりしない 本機の損傷や故障のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所温度変化の激しい場所、振動の激しい場所湿気の多い場所や水気のある場所
	必ず守る	体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない 必ず付き添いの方がサポートしてください。
	必ず守る	電池を入れるときは、極性（＋、－）の方向を間違わない 液漏れなどで、床などを汚損するおそれがあります。（長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取りはずしてください。）
	注意	ぬれた体で乗らない 体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをすおそれがあります。また、正確な測定ができません。
	注意	操作部をぬらしたり汚したりしない ボタンが反応しなかったり、誤動作のおそれがあります。

他の通信機能付きの機器、電子レンジやワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本機の近くで使用しない


- 誤動作して正確に測定できないおそれがあります。
- 電線、鉄道架線、発電所、ラジオ・テレビの電波塔などの外部の環境によっても干渉する場合があります。そのような環境においては可能な限り遠くに離れてご使用ください。

2. 正しいはかりかた

測定場所	硬く、平らな安定した所でご使用ください。 <ul style="list-style-type: none">直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所には置かない。温度変化の激しい場所での使用は、避ける。湿度の多い場所や水気のある所には、置かない。コルク床やクッションフロアーなどの軟らかい床でご使用になると、精度の保証ができません。 また、ご使用になる場所によっては、凹みなどの跡が残る可能性がありますので、ご使用される場所の隅の方などでご確認ください。	
	じゅうたんや、畳の上ではご使用できません 正しく測定できません	

測定時間・条件

生活パターンの違いにより体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った変動があります。さらに、測定値は体内水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変化傾向を見ることをおすすめします。

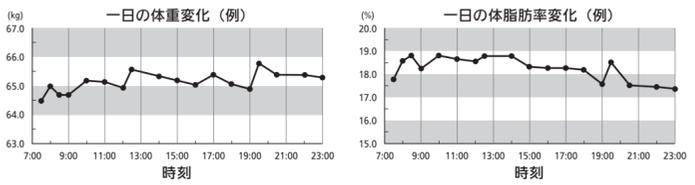

■ オススメ測定時間

起床・朝食	2時間後	オススメ測定時間	昼食	2時間後	オススメ測定時間	夕食・入浴	2時間後	オススメ測定時間	就寝
	必ず守る	過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける 測定値に誤差が生じる可能性があります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。		必ず守る	サウナや長湯、激しい運動をした後は、測定を避ける 測定値に誤差が生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。		必ず守る	体調の悪い場合（二日酔い、下痢、発熱などのときは）、測定を避ける 測定値に誤差が生じる可能性があります。充分休んでから、測定してください。	

測定姿勢

正確な測定のために、いつも正しい姿勢を心がけてください。

	必ず守る	<ul style="list-style-type: none">つま先側とかかと側の電極に足が均等にかかるように、素足で乗ってください。 ※ 足がみ出る場合は床に足がつかないように乗ってください。操作部に足が触れないように乗ってください。	
--	-------------	--	--

	必ず守る	なるべく裸に近い状態で測定する 着衣のまま計測すると、着衣の重さが含まれます。
	必ず守る	足の裏を、電極部に正しく合わせて測定する 電極と足の裏が接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、「Err」(エラー)が表示されたりする場合があります。
	必ず守る	素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する 靴下などを履いていたり、足の裏にほこりなどがついていたりすると、正確に測定できません。
	必ず守る	ヒザを曲げたり、座ったまま測定しない 正確に測定できません。
	必ず守る	測定中は動かない 測定中に動くと、正確に測定できません。
	必ず守る	足の内側（内もも）がつかないように測定する 内ももがついてしまう場合は、乾いたタオルなどをはさんで測定してください。

MEMO

以下に当てはまる方は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします。

- ポディービルダー、力士、スポーツを職業とされている方、およびそれに近い方
- 体内に金属を装着されている方
- 体水分の変化を誘発する薬（例：利尿剤など）を服用されている方
- 妊娠中や、人工透析をされている方、またはむくみ症状の方

※ 本機の体組成測定は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象としています。上記のような方は、体脂肪率の信頼性が低下するおそれがあります。

- かかとの表面（角質層）が固い状態の方は、正常な測定ができません。足の裏をしめらせてから測定してください。

3. 各部の名前／付属品

各部の名前	
● 表面	● 裏面
● 操作部 ※ 指の腹でしっかり触れてください。 <ul style="list-style-type: none">▼/呼出ボタン 登録内容を選択するときに使用します。<ul style="list-style-type: none">個人番号やゲストモードを呼び出すときに使用します。設定▲/測定項目ボタン 登録内容を選択するときに使用します。<ul style="list-style-type: none">測定結果を切り替えるときに使用します。OFF/体重ボタン 電源を切るときに使用します。<ul style="list-style-type: none">体重のみをはかるときに使用します。	付属品 <ul style="list-style-type: none">取扱説明書（本書）保証書付きお試用電池 <単4形（R03）：4本>（電池ボックスに入っています。）
MEMO <ul style="list-style-type: none">操作ボタンに触れると、表示部にマークが点灯します。	

この取扱説明書に掲載されているイラスト、画面は、操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

4. 電池をセットする

- 本機裏面の電池カバーを矢印の方向に押し上げて開けます。
⇒ お試用電池は電池ボックスに入っています。
- 絶縁シートを取り除き、電池カバーを閉めます。

■ 電池の交換

電池の残量が少なくなると「**Lo**」が表示されます。速やかに新しい電池（4本すべて）と交換してください。

	禁止	<ul style="list-style-type: none">新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。故障するおそれがあります。充電式電池を使用しないでください。故障するおそれがあります。
	必ず守る	電池を入れるときは、極性（＋、－）の方向を間違わないでください。故障するおそれがあります。

MEMO

- 使用済みの電池は、お住まいの市区町村の廃棄方法に従って処理してください。
- 電池を交換したあとに自動で電源が入ることがあります。その場合は、本機を床上に置き、OFFボタンを押してください。それでも電源が切れない場合は、電池をはずして表示を消してから、電池を入れ直してください。
- 付属の電池はお試用電池のため、電池寿命が短い場合があります。
- 電池の寿命は約1年（1日に5回を使った場合）です。※ご使用条件により異なります。
- 登録した個人データ（年齢/性別/身長）、地域番号は、電池を外しても消えません。

5. 地域を設定する

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じることがあります。ご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

- 電源が入っていないことを確認し、設定ボタンを押します。
 - MEMO**
 - 初めて電池を入れたときは、▼ボタン、OFFボタンを押しても地域設定画面に入ります。地域設定画面が表示されない場合は、OFFボタンを押して一度電源を切り、画面が消えていることを確認してからOFFボタンを3秒以上長押ししてください。地域設定画面が表示されます。
- ▼ボタンまたは▲ボタンを押して、以下の表からお住まいの地域番号を選択します。

地域1	北海道
地域2	本州、四国、九州
地域3	沖縄
- 設定ボタンを押して、地域番号を決定します。
以上で地域の設定は終了です。
 - 引越しなどで使用地域が変わった場合は、電源が入っていないことを確認し、OFFボタンを3秒以上長押ししてください。地域設定画面に移ります。

MEMO

- 操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。
- 設定を中止したい場合は、OFFボタンを押してください。途中で中止した場合は、地域は保存されません。

6. 個人データを登録する

はかる前に、年齢、性別、身長登録が必要です。個人データは5人まで登録することができます。

1 電源が入っていないことを確認し、設定ボタンを押します。

2 登録する番号を決めます。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して登録する個人番号（1～5）を選択し、設定ボタンを押して決定します。
点灯している番号には、すでに個人データが登録されています。

3 年齢を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して年齢を選択し、設定ボタンを押して決定します。

MEMO

- 年齢は6～99才の範囲で登録できます。
- 登録した年齢は自動で更新されません。誕生日ごとに年齢を更新してください。（※「F10.個人データを変更/消去する」）

4 性別を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して性別（「女」または「男」）を選択し、設定ボタンを押して決定します。

5 身長を登録します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して身長を選択し、設定ボタンを押して決定します。

MEMO

- 身長は90.0～220.0cmの範囲で登録できます。

登録内容が表示された後、電源が切れます。

女	-3-	37才	159.5 cm
---	-----	-----	----------

以上で個人データの登録は終了です。

MEMO

- 操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。
- 設定を中止したい場合は、OFFボタンを押してください。途中で中止した場合は、個人データは保存されません。
- ▼ボタンまたは▲ボタンを長押しすると、数値が早送りされます。

7. 体組成を測定する（個人番号で測定する/ゲストモードで測定する）

個人番号で測定する場合、あらかじめ個人データの登録が必要です。（※「6.個人データを登録する」）

1 電源が入っていないことを確認し、▼/呼出ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して、自分の個人番号を選択し、設定ボタンを押します。

▼ボタンまたは▲ボタンを押して「-0-」を選択し、設定ボタンを押します。年齢・性別・身長を▼ボタンまたは▲ボタンを押して選択し、設定ボタンを押して決定してください。

女	-3-	設定
---	-----	----

個人データ表示後、「00kg」が表示されます。

MEMO

- 「00kg」が表示される前に本機に乗ると、「Err」または「-0L」が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

00kg

個人データ表示後、「00kg」が表示されます。

MEMO

- 「00kg」が表示される前に本機に乗ると、「Err」または「-0L」が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

素足になり、正しい姿勢で本機に乗ります。

参照

- 正しいはかりかたについては、「2.正しいはかりかた」をご覧ください。

測定結果が表示されたら測定終了です。結果が自動で表示されます。測定結果表示中に▲/測定項目ボタンを押すと、項目を切り替えることができます。

体重	52.7 kg
内臓脂肪レベル	4.5レベル
BMI	21.0
体脂肪率	28.3%

測定結果表示中に設定/前回値ボタンを押すと、前回値を見ることができます。

MEMO

- 体脂肪率の測定範囲を超えると「Err%」（エラー）が表示されます。
- 17才以下の場合は、「体重」、「BMI」、「体脂肪率」のみが表示されます。

ご注意

転倒防止のため、必ず本機から降りて操作してください。

8. 前回の値をみる

前回値ボタンを使うと、各項目の前回測定した値を見ることができます。

■測定終了後に前回値を確認したい場合

- 測定終了後、本体を降りてから、測定結果が表示されている間に設定/前回値ボタンを押すと、表示している項目の前回の値が表示されます。このとき▲/測定項目ボタンを押すと、別の項目の前回値を表示します。もう一度設定/前回値ボタンを押すと、今回の測定値に戻ります。

ご注意

転倒防止のため、必ず本機から降りて操作してください。

■測定せずに前回値を見たい場合

1 電源が入っていないことを確認し、▼/呼出ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して、自分の個人番号を選択し、設定ボタンを押します。

女	-3-	設定
---	-----	----

3 「00kg」が表示されたら、設定/前回値ボタンを押します。

00kg

前回の測定値が順に表示されます。

前回体重	52.9 kg	前回BMI	21.1	前回体脂肪	28.8%	前回内臓脂肪	4.5レベル
------	---------	-------	------	-------	-------	--------	--------

▲/測定項目ボタンを押すと、別の項目の前回の値を表示します。

9. 体重だけを測定する

体重だけをはかることもできます。

1 OFF/体重ボタンを押します。

「00kg」が表示されます。

MEMO

- 「00kg」が表示される前に本機に乗ると、「Err」または「-0L」が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

2 正しい姿勢で本機に乗ります。

MEMO

- 測定を中止したいときや表示画面を消したいときは、OFFボタンを押してください。

10. 個人データを変更/消去する

1 電源が入っていないことを確認して、設定ボタンを押します。

2 ▼ボタンまたは▲ボタンを押して変更（消去）したい番号を選択します。

消去する場合は手順6へお進みください。

<変更する>

3 設定ボタンを押します。

4 「6.個人データを登録する」に従って、個人データを修正します。

■年齢を上げる、または身長を変更した場合 ※この場合、前回の値は消去されません。身長登録後、登録内容が表示され電源が自動で切れます。これで個人データの変更は終了です。

■年齢を下げる、または性別を変更した場合 ※この場合、前回の値は消去されます。「[Lr]」（クリア）が表示されます。手順5にお進みください。

[Lr]

5 個人データを上書きしたい場合は▼ボタンまたは▲ボタンで「YES」（イエス）を選択し、設定ボタンを押します。

MEMO

「no」（ノー）を選択すると、変更したデータは登録されません。

登録内容が表示された後、電源が切れます。

以上で個人データの変更は終了です。

<消去する>

6 設定ボタンを3秒以上長押しします。

個人データが表示されたあと、「[Lr]」（クリア）が表示されます。

7 ▼ボタンまたは▲ボタン押して「YES」（イエス）を選択し、設定ボタンを押します。

データが消去されます。

MEMO

- 「no」（ノー）を選択すると、個人データは消去されません。

以上で個人データの消去は終了です。

MEMO

- 操作を中断したまま、約60秒経過すると、電源が自動で切れます（オートパワーオフ機能）。
- 設定を中止したいときや表示画面を消したいときは、OFFボタンを押してください。

11. 体の豆知識

		10%	20%	30%	40%																																								
男性	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
女性	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
6才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
7才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
8才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
9才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
10才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
11才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
12才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
13才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
14才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
15才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
16才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
17才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
18-39才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
40-59才	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
60才+	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

●体脂肪率判定表
詳しい分析が可能な「DXA法（二重X線吸収法）」を基準に採用し、性別と年齢ごとに細分化された新判定法で毎日の健康チェックをサポートします。DXA法は体組成分析として精度良く身体の中を細分化測定できる方法として、近年医学界で主流となっています。妊娠中や人工透析中の方、またはむくみ症状がある方は、参考値として変化の推移を見られることをおすすめします。

MEMO	00kg
------	------

「00kg」が表示される前に本機に乗ると、「Err」または「-0L」が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

BMI=体重(kg)÷身長(m) ²				
	やせ	普通	肥満1	肥満度2以上
BMI値	18.5未満	18.5以上25未満	25以上30未満	30以上
				
	<small>※BMIによる判定は個人を対象していません。 ※2000年度の厚生労働省「健康日本21」における新基準を採用しています。 疾病率が最も少ない、理想的なBMI値は「22」とされています。 このことから、あなたの身長に対する理想的な体重は次の式で求めることができます。</small>			
理想体重(kg)=22.0×身長(m) ²				

内臓脂肪とは ※17才以下の方は表示されません。

腹腔内の内臓のすき間に付く脂肪で、皮下脂肪よりも生活習慣病の起因となりやすいものです。そのため、内臓脂肪の状態をチェックすることは、生活習慣病を予防する上で大切な目安となります。

●内臓脂肪レベルの判定基準 ※対象年齢：18才～99才	
レベル	判定の目安かた
9.5以下	標準
10.0～14.5	やや過剰
15.0以上	過剰
	積極的な運動や食事制限による減量が必要です。医学的な診断については医師にご相談ください。

- 測定した**内臓脂肪レベル**について
 - 内臓脂肪蓄積のリスクを統計的に評価したものです。
 - 体脂肪率が低い方でも、内臓脂肪レベルが高い場合もあります。
 - 医学的診断については、医師にご相談ください。

12. 故障かなと思ったら

「故障かな?」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

症 状	ご確認ください	参照先
ボタンを押しても、何も表示されない・反応ににくい	<ul style="list-style-type: none">ボタンが濡れたり汚れたりしていませんか？ ボタンには指の腹でしっかりと触れていますか？ 電池が、はずれていませんか？ 電池が、消耗していませんか？ 電池接点に、ビニールやゴミなどがついていませんか？	<ul style="list-style-type: none">※「1.安全上のご注意」 ※「3.各部の名前/付属品」 ※「4.電池をセットする」
「Lo」が表示される	<ul style="list-style-type: none">電池の向きを確認し、正しく入れてください。 電池が消耗しています。速やかに交換してください。	<ul style="list-style-type: none">※「4.電池をセットする」
文字などが表示されたあと、すぐ表示が消える	<ul style="list-style-type: none">電池が消耗しています。（電池の残量によっては「Lo」を表示しない場合があります）	<ul style="list-style-type: none">※「4.電池をセットする」
ボタンを押すと、地域設定		