


### 取扱説明書

#### 各部の名称

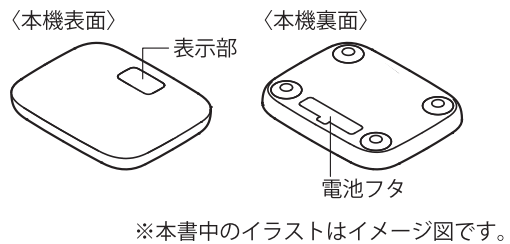

#### 付属品

取扱説明書（本書）保証書付  
お試用電池：単3形乾電池（R6）×2本

#### 安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負うおそれのある」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生するおそれのある」内容です。
- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。
- ❗ 「必ず守っていただく」内容です。

#### 警告

- 警告** ご使用前及びご使用中に本機に異常が確認されたら使用しない  
異常があるままご使用になると、けがをすおそれや正確に測定できないおそれがあります。
- 禁止** 本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない  
転倒したり、すべったりして大けがをすおそれがあります。
- タイル面やぬれた床など、すべりやすいところでは使わない  
転倒したり、すべったりして大けがをすおそれがあります。また、本機内部に水が侵入し故障のおそれがあります。

#### 注意

- 禁止** 表示部の上に乗らない  
転倒したり、破損してけがをすおそれがあります。また、故障のおそれがあります。
- 隙間や穴に指を入れない  
けがをすおそれがあります。
- 禁止** 充電式の電池は使用しない  
公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、誤動作や故障のおそれがあります。

- 禁止** 新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない  
液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障、けがなどのおそれがあります。
- 乳幼児には、絶対に持ち運びさせない  
落として、けがをすおそれがあります。
- 業務用（病院等での測定）には絶対に使用しない  
業務用として病院等で使用するための機能を備えておりません。
- 熱湯、ベンジン、シンナー等の薬品を使用しない  
本機の損傷や故障のおそれがあります。汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
- 分解や水洗いをしない、過度の衝撃や振動を与えない  
本機の損傷や故障のおそれがあります。
- 以下のところで本機を保管・使用しない  
本機の損傷や故障のおそれがあります。
  - ・直射日光のあたるところ、暖房器具の近く、または空調機の風が直接あたるところ
  - ・温度変化の激しいところ
  - ・湿気が多いところや水気のあるところ
- 必ず守る** 体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない  
介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。  
（※手すり等を利用した場合、測定結果は参考値として捉えてください。）
- 電池を入れるときは、極性（⊕、⊖）の方向を間違わない  
液漏れなどで、床等を汚損するおそれがあります。（長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取りはずしてください。）
- ぬれた体で乗らない  
体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをすおそれがあります。
- 携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近くで使用しない  
誤動作して正確に測定できないおそれがあります。

#### 仕様

品番	HD-CU
計量範囲	0～150kg
最小表示	100g（0～100kg） 200g（100～150kg）
ステップオン荷重	12kg以上
電源	DC3V 単3形乾電池（R6）×2本
消費電流	最大20mA
寸法	約幅244 x 高さ33 x 奥行200mm
質量	約740g（乾電池含む）

#### 計量精度

本機はJIS（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳重な検査をしたうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0～75kgまではかる場合	±200g
75kgを超え100kgまではかる場合	±300g
100kgを超え150kgまではかる場合	±600g

（使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合）  
ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。



#### 初期設定のしかた

1. 本機裏面の電池フタを開けてください。  
⇒ 電池フタは、はずれます。  
本機の表示に合わせて電池を入れ、閉めます。  
※お試用電池は電池ボックスに入っています。絶縁シートを取り除いて電池フタを開けてください。
2. 硬く平らな安定したところに置いてください。  
表示が消えていることを確認し、本機中央を踏んでください。  
 「88888」が表示されたら、本機から降りてください。  
「00.」が表示されたら測定可能です。  
※電池交換後や「Err」表示後は、一度表示が消えてから2.の操作を行ってください。

#### 電池の交換

- 電池が消耗してくると「Lo」が点灯します。新しい電池と交換してください。（精度の保証ができません）
- 電池を交換した後は「初期設定のしかた」の2.の操作を行ってください。
- 公称電圧が1.2V以下の充電式電池は誤動作や故障の原因となります。未使用の単3形乾電池2本をご使用ください。
- 使用済み電池は、お住まいの市区町村の破棄方法に従って処理してください。
- 電池の寿命は約1年です。（1日に5回はかった場合）
- 付属の「お試用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。

#### 使用上のご注意

##### こんな保管をしたとき

本機を立てかけたり、物の上に置いた状態で保管した後にご使用になると、測定値に誤差を生じる場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。

1. 硬く平らな安定したところに置いてください。
  2. 本機中央を踏み、降りてください。  
表示がつかめます。
  3. 再度、本機中央を踏み、降りてください。  
表示が消えます。
- 以上の操作を行ってから はかってください。

- ・硬く平らな安定したところでご使用ください。
- ・じゅうたんや、畳の上では使用できません。
- ・コルク床やクッションフロアなど、柔らかい床でご使用になると、精度の保証ができません。
- ・測定値が最大計量を超えている場合は「OL」を表示します。

#### はかりかた

1. 硬く平らな安定したところに置き、本機に乗ります。  
自動的に電源が入り、体重が表示されます。
2. 体重が確定すると表示部に○印がついて、点滅表示します。本機から降ります。
3. 点滅表示してから約20秒経つと、「OFF」が表示され電源が切れます。  
※12kg未満の場合は、自動的に電源が入りません。一度本機中央を踏み、「00.」が表示されてから乗ってください。  
※測定後表示が消えるまで本機を動かさないでください。  
※本機に乗ってから30秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。

#### 保証書

販売店様へ  
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ  
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品名	デジタルヘルスマーター HD-CU	
保証期間	お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	ご住所	
	お名前	様
	お電話	( )
販売店	店名・所在地	
	電話	( )

販売元 株式会社 **タニタ**  
本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

製造元 株式会社 **タニタ** 秋田  
タニタサービスセンター 〒014-0113 秋田県大曲市堀内字下田茂木28-1  
ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先  
フリーダイヤル **0120-133821**  
※携帯電話からはフリーダイヤルにはつながりません。  
※携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。  
ナビダイヤル **0570-783551**  
※通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。  
受付時間 / 9:00～18:00（祝日を除く～金）

#### アフターサービスについて

1. 保証書について  
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
2. 修理を依頼されるとき  
● 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ保証書を添えて本機をお送りください。  
● 保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

#### 無料修理規定

1. 取扱説明書等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡のうえ、商品と保証書をお送りください。
3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天変地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - ニ. 一般家庭以外（例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - ホ. 付属品、消耗品の故障及び交換
  - ヘ. 保証書の提示がない場合
  - ト. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※保証期間に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。