


取扱説明書 保証書付

各部の名称

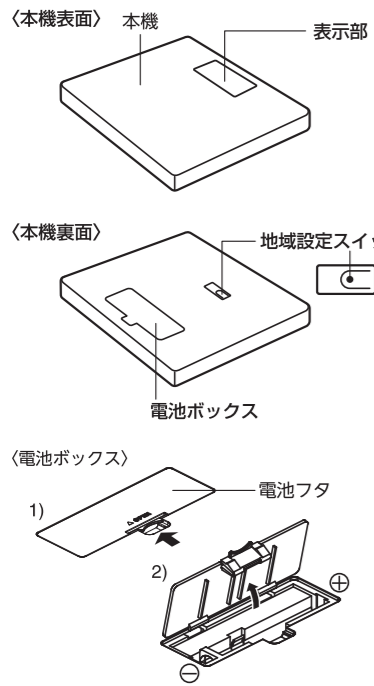

※本書中のイラストはイメージ図です。

安全上のご注意

本書では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、安全に正しくお使いください。

- 警告** この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負うおそれのある」内容を表示しています。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生するおそれのある」内容を表示しています。
- してはいけない「禁止」内容を示しています。
- 「必ず守っていただく」内容を示しています。

警告

禁止 **タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない**
転倒したり、すべて大けがをするおそれがあります。また、本機内部に水が侵入し故障するおそれがあります。

注意

禁止 **表示部や操作部の上に乘らない**
転倒したり、破損してけがをするおそれがあります。また、故障するおそれがあります。
隙間や穴に指を入れない
けがをするおそれがあります。
充電式の電池は使用しない

禁止 **新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない**
液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障、けがをするおそれがあります。
乳幼児には、絶対に持ち運びさせない
落として、けがをするおそれがあります。

必ず守る **体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない**
介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。(※手すり等を利用した場合、測定結果は参考値として捉えてください。)
電池を入れるときは、極性(⊕、⊖)の方向を間違わない
液漏れなどで、床等を汚損するおそれがあります。(長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取り外してください。)
ぬれた体で乗らない
体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをするおそれがあります。また、正確な測定ができません。
携帯電話や電子レンジなど電波を発する機器を本機の近くで使用しない
誤動作して正確に測定できないおそれがあります。

仕様

品番	HD-UN
計量範囲	0～150kg
最小表示	100g (0～100kg) 200g (100～150kg)
ステップオン荷重	12kg以上
電源	DC3V単3形乾電池 (R6) × 2本
消費電流	最大 20mA以下
寸法	約幅244×高さ33×奥行200mm
質量	約 740g (乾電池含む)

※ デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

計量精度

本機は JIS (家庭用はかり) に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

0kg から 100kg まではかる場合	± 200g
100kg を超え 150kg まではかる場合	± 400g

(使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合)

ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。



初期設定のしかた

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

- 本機裏面の電池フタを矢印の方向に押し上げて開けてください。
⇒ 電池フタは、はずれます。
⇒ お試用電池は、電池ボックスに入っています。
絶縁シートを取り除き、電池フタを閉めます。
- 本機裏面の地域設定スイッチを押して、以下の表からお住まいの地域番号を選択します。



※ 本州・四国・九州にお住まいの方は、2.の操作は不要です。工場出荷時は「地域2」(本州・四国・九州)に設定されています。

地域1：北海道
地域2：本州・四国・九州
地域3：沖縄

番号が選択されて3秒後に電源が切れ、地域が設定されます。

- 硬く平らな安定した所に置いてください。表示が消えている事を確認し、本機中央を踏んでください。
- 「88888」表示後、本機から降りてください。「00kg」が表示されたら測定可能です。
※ 電池交換後や「[rr]」表示後は、一度表示が消えてから3.の操作を行ってください。

以上で初期設定は終了です。

電池の交換

- 電池が消耗してくると「Lo」が点灯します。新しい電池と交換してください。(精度の保証ができません)
- 電池を交換する時は、本機を裏返しにし、電池フタの爪を押し上げて開け、電池を入れてください。
※ 電池を交換した後は「初期設定のしかた」の3.の操作を行ってください。
- 使用済みの電池は、お住まいの市町村区の破棄方法に従って処理してください。
- 付属の「お試用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- 電池の寿命は約1年です。(1日に5回はかった場合)

使用上のご注意

<こんな保管をしたとき>

本機を立てかけたり、物を上に置いた状態で保管した後にご使用になると、測定値に誤差を生じる場合があります。この場合、以下の操作を行ってください。

- 硬く平らな安定したところに置いてください。
- 本機中央を踏み、降りてください。表示がつきます。
- 再度、本機中央を踏み、降りてください。表示が消えます。

以上の操作を行ってからはかってください。

- 硬く平らな安定した所でご使用ください。
- じゅうたんや、畳の上ではご使用できません。
- コルク床やクッションフロアなど、やわらかい床でご使用になると、凹みなどの跡が残る可能性があります。
※ ご使用前に目立たない場所 (ご使用される場所の隅の方など) でご確認ください。
- 測定値が最大計量をこえている場合は「OL」を表示します。

はかりかた

- 硬く平らな安定した所に置き、本機に乗ります。
自動的に電源が入り、体重が表示されます。
※ 12kg以下のものをはかる場合は、一度本機中央を踏み、「00kg」が表示されてから乗せてください。
- 体重が確定すると表示部に○印が付き、点滅表示したら本機から降ります。
測定後約20秒経つと、「OFF」が表示され、電源が切れます。
※ 「OFF」表示中に、本機を動かしたり、本機に乗ったりしないでください。
※ 本機に乗ってから30秒以内に体重が確定しない場合は自動的に電源が切れます。
以上ではかりかたは終了です。

保証書

販売店様へ
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。お客様個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品名	デジタルヘルスマーター	HD-UN
保証期間	お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年	月 日
お客様様	ご住所	
	お名前	様
	電話	()
販売店	住所・店名	
	電話	()



アフターサービスについて

- 保証書について
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
- 修理を依頼されるとき
●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡の上保証書を添えて本機をお送りください。お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただき、修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないように、当社規定に基づき責任を持って管理いたします。
●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

無料修理規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、商品と保証書をお送りください。
- ご購入品等で本保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
ロ. お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
ハ. 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
ニ. 一般家庭以外(例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
ホ. 保証書の提示がない場合
ヘ. 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。