


感熱式プリンターセット (OP-201) 接続説明書


このたびは、感熱式プリンターセット (OP-201) をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書、プリンター本体取扱説明書および測定器の取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また、本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

OP-201 セット内容


- 感熱式プリンター
(ACアダプター付)

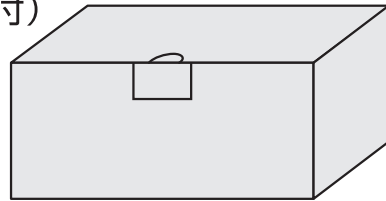

- RS-232Cストレートケーブル
(D-sub9ピン、オス
ーD-sub9ピン、メス)

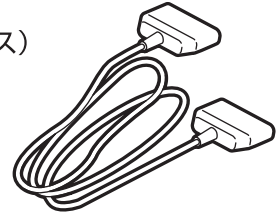

- 専用プリンター用紙
4巻セット
(No.2903)

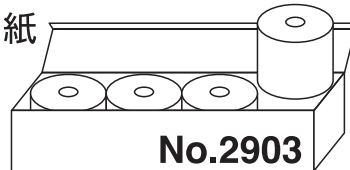

- ✓ 接続説明書
(本書)
保証書付



本書に記載されているイラストはイメージ図です。

測定器 — プリンター接続方法

(各部の名称・操作については、プリンター本体取扱説明書、測定器の取扱説明書をご参照ください。)

測定器とプリンター背面にRS-232Cコネクターが付いています。

- ・測定器 : D-sub9ピン、メス
- ・プリンター : D-sub9ピン、オス

① プリンターに専用プリンター用紙をセットします。

(セット方法: プリンター本体取扱説明書をご参照ください。)

② 測定器とプリンターを、付属のRS-232Cストレートケーブルで接続します。

このとき測定器側にはケーブルのD-sub9ピン、オスを接続し、プリンター側にはD-sub9ピン、メスを接続します。

(接続例は裏面をご参照ください。)

③ プリンターにACアダプターを接続し、電源を入れます。

④ 測定器の電源を入れます。


これで接続は完了です。

※ 測定器側の設定を確認してからプリントをしてください。


詳しくは、測定器の取扱説明書をご覧ください。

◆接続例◆

例1) BD-815との接続

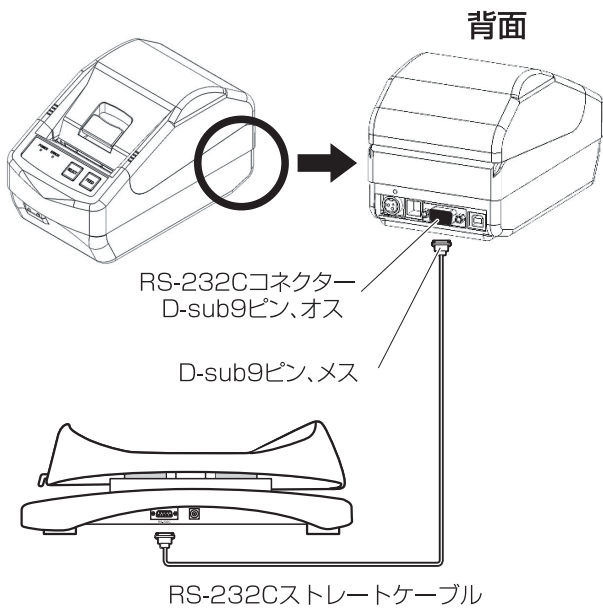

例2) WB-150との接続

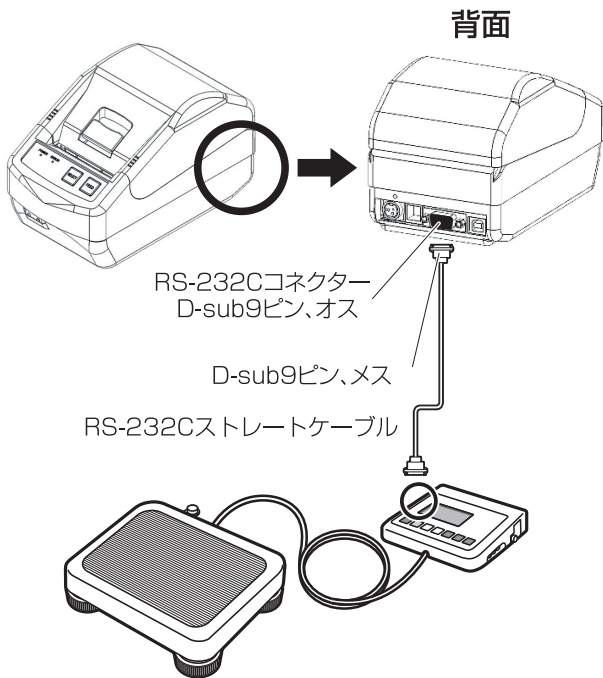

*デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書について
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
2. 修理を依頼されるとき
●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、本機に保証書を添えてお送りください。
●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理をさせていただきます。
3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室へお問い合わせください。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書などの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した範囲には、無料修理をさせていただきます。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、本機と保証書をお送りください。
 3. ご贈答品等で本保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
ハ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
ニ、保証書の掲示がない場合
ホ、保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 5. 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
 6. 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。
- ※ 保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

TANITA 保証書

販売店様へ
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

お客様へ
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご呈示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
※お客様の個人情報、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

品名	感熱式プリンターセット OP-201		
保証期間	お買い上げ日より 1年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所	_____	
	お名前	_____ 様	
	電話	()	
販売店	住所・店名	_____	
	電話	() (印)	

株式会社 **TANITA**

〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 本社・お客様サービス相談室

受付時間/9:00~18:00 (祝日を除く月~金)

フリーダイヤル ☎0120-133821 / ナビダイヤル ☎0570-783551 (有料)

株式会社 **TANITA**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス <http://www.tanita.co.jp>

お問い合わせ先

フリーダイヤル ☎0120-133821

携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル ☎0570-783551

通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間/9:00~18:00(祝日を除く月~金)

OP2017601(1)-1702TA

©2007-2017 TANITA Corporation