


# 取扱説明書

保証書付

## 体重計

CA-100 / HD-664 / HD-665

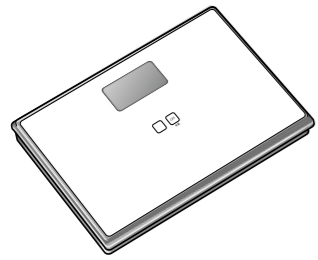

本書に記載されているイラストはイメージ図です。


このたびは、体重計 CA-100/HD-664/HD-665 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。毎日の健康管理や生活にお役立てください。

### お願い


誤った使いかたをしますと重大な事故につながります。本書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。また必要なときにすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

## 各部の名称

### ● 表面


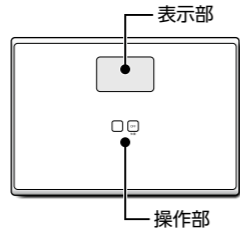


### ● 裏面

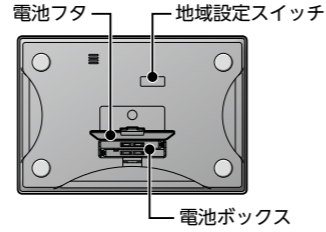

### ● 操作部

※ 指の腹でしっかり触れてください。

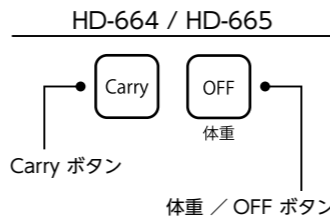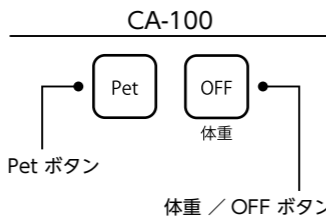

### MEMO

操作ボタンに触れると、表示部に マークが点灯します。



本書に掲載されているイラスト、画面は、操作説明のためのものです。

したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

## 付属品

以下の付属品が同梱されているか、ご確認ください。

- 取扱説明書（本書）保証書付
- お試用電池（単 4 形乾電池（R03）× 4 本）

不足しているものがありませんでしたら、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。

## 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本機を正しくご使用ください。

	<b>警告</b>	この表示の欄は「死亡または重傷 <sup>*1</sup> を負うおそれのある」内容です。
	<b>注意</b>	この表示の欄は「傷害 <sup>*2</sup> を負うおそれまたは物的損害 <sup>*3</sup> が発生するおそれのある」内容です。
		してはいけない「禁止」内容です。
		「必ず守っていただく」内容です。

※ 1: 重傷とは失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※ 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※ 3: 物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

## 警告

	ご使用前および使用中に本機に異常が確認されたら使用しない 異常があるままご使用になると、けがや事故が発生するおそれがあります。
	本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない 転倒したり、すべったりして大けがをするおそれがあります。
	タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使わない 転倒したり、すべったりして大けがをするおそれがあります。また、本機内部に水が侵入し故障するおそれがあります。

## 注意

	表示部の上に乗らない 転倒したり、破損してけがをするおそれがあります。また、故障するおそれがあります。
	隙間や穴に指を入れない けがをするおそれがあります。
	充電式の電池は使用しない 公称電圧が 1.2V 以下の充電式電池は、誤動作や故障するおそれがあります。
	新しい電池と使用済みの電池、種類の違う電池を同時に使用しない 液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障、けがをするおそれがあります。
	乳幼児には、絶対に持ち運びさせない 落として、けがをするおそれがあります。
	業務用（病院等での測定）には絶対に使用しない 業務用として病院等で使用するための機能を備えておりません。
	熱湯、ベンジン、シンナー等の薬品を使用しない 本機の損傷や故障するおそれがあります。汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。
	分解や水洗いをしない、過度の衝撃や振動を与えない 本機の損傷や故障するおそれがあります。
	以下の場所で本機を保管・使用しない 本機の損傷や故障するおそれがあります。 ・直射日光のあたる場所、暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる所 ・温度変化の激しい所 ・湿気の多い場所や水気のある所
	体の不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない 介護者が援助するか、手すりの利用をおすすめください。（※手すり等を利用した場合、測定結果は参考値として捉えてください。）
	電池を入れるときは、極性（⊕、⊖）の方向を間違わない 液漏れなどで、床等を汚損するおそれがあります。（長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取りはずしてください。）
	ぬれた体で乗らない 体や足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをするおそれがあります。
	通信機能付きの機器、電磁波を発生する家電製品、および強力な電磁波のある環境では使用しない 本機が誤動作して電池寿命に影響を及ぼすおそれや、正確に測定できないおそれがあります。電子レンジやワイヤレス通信機器、および電線、発電所、電波塔の近くなどから可能な限り遠くに離れてご使用ください。

## 仕様

品番	CA-100/HD-664/HD-665
計量範囲	0 ~ 150kg
最小表示	50g (0 ~ 100kg)、100g (100 ~ 150kg)
ペットモード キャリアモード (計算値)	最小表示 50g (0 ~ 50kg)
ステップオン荷重	12kg 以上
電源	DC6V 単 4 形乾電池 (R03) × 4 本
消費電流	最大 30mA 以下
寸法	約 幅316×高さ27×奥行217mm
質量	約 1.5kg (乾電池含む)

※ ペットの体重や荷物の重さは計算値です。  
※ デザイン及び仕様は予告なく変更する場合があります。

## 計量精度

本機は JIS（家庭用はかり）に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して下記の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0kg から 100kg まではかる場合	± 100g
100kg を超え 150kg まではかる場合	± 200g

(使用温度：23℃±5℃、湿度：50%±20%の場合)

ご家庭で体重をはかることを目的に作られておりますので、物品の売買取引や目方を証明する場合にはご使用になれません。

## 測定場所

- ・ 硬く平らな安定したところでご使用ください。
- ・ じゅうたんや、畳の上では使用できません。
- ・ コルク床やクッションフロアーなど、やわらかい床でご使用になると、凹みなどの跡が残るおそれがあります。  
※ ご使用前に目立たない場所（ご使用される場所の隅の方など）でご確認ください。
- ・ 測定値が計量範囲の上限を超えている場合は「」を表示します。

## 電池の交換

- ・ 電池が消耗してくると「」が点灯します。新しい電池（4本すべて）と交換してください。（精度の保証ができません）
- ・ 電池を交換する時は、本機を裏返しにし、電池フタの爪を押し上げて開け、電池を入れてください。  
※ 電池を交換した後は「初期設定のしかた」の 3. <0リセット>を行ってください。
- ・ 使用済みの電池は、お住まいの市区町村の破棄方法に従って処理してください。
- ・ 付属の「お試用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- ・ 電池の寿命は約 1 年です。（1 日に 5 回はかった場合）

## 初期設定のしかた

高精度のほかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じる場合があります。本機はご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

1. **<電池を入れる>**  
本機裏面の電池フタを矢印の方向に開けてください。  
⇒ 電池フタは、本機から外れます。  
  
⊕ ⊖を間違えないように電池を入れ、電池フタを閉めます。
2. **<地域設定>**  
本機裏面の地域設定スイッチを押して、以下の表からお住まいの地域番号を選択します。  
地域設定スイッチを押すごとに「AREA3」→「AREA4」→「AREA5」→「AREA1」→「AREA2」→「AREA3」・・・と切り替わります。

AREA 1: 北海道
AREA 2: 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
AREA 3: 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
AREA 4: 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
AREA 5: 沖縄

※ 工場出荷時は「AREA3」に設定されていますので、該当する地域にお住まいの方は、地域設定は不要です。番号が選択されて約 5 秒後に電源が切れ、地域が設定されます。

3. **<0リセット>**  
硬く平らな安定した所に置いてください。  
表示が消えている事を確認し、「体重 / OFF」ボタンを押してください。  
  
 →   
「8888」表示後、「」が表示されたら「体重 / OFF」ボタンを押してください。  
表示が消えます。

以上で「初期設定のしかた」は終了です。

- ・ 電池交換後や「」表示後は、一度表示が消えてから 3. <0リセット>を行ってください。
- ・ 地域設定を変更したい場合は 2. <地域設定>、3. <0リセット>の手順で変更してください。



経済産業省令  
適合マーク




JIS B 7613  
JQ0313011




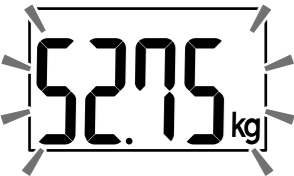
HD-664


## 体重ボタンを押して体重をはかる

- 

本機を硬く平らな安定した所に置き、「体重 / OFF」ボタンを押します。

※「8888」が表示されますので、動かしたり乗ったりしないでください。「Err」が表示されます。
- 

「0.00」表示後、本機に乗ります。
- 


ピッと鳴り、表示が点滅したら本機から降ります。
- 

点滅が止まり、約 60 秒後に自動で電源が切れます。


以上で「体重ボタンを押して体重をはかる」は終了です。


- 本機に乗ってから約 60 秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。
- すぐに電源を切りたい場合は、「体重 / OFF」ボタンを押してください。
- 測定値が計量範囲の上限を超えている場合は「OL」を表示します。
- 「0.00」が表示される前に本機に乗ると、体重がはかれません。この場合は再度「体重 / OFF」ボタンを押して測定してください。

## ボタンを押さずに体重をはかる

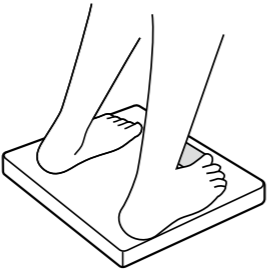- 

本機を硬く平らな安定した所に置いて乗ります。自動で電源が入ります。

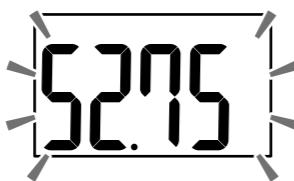※ 12kg 未満の場合は、自動的に電源が入りません。「体重 / OFF」ボタンを押して、測定してください。
- 

ピッと鳴り、表示が点滅したら本機から降ります。
- 

点滅が止まり、約 60 秒後に自動で電源が切れます。

以上で「ボタンを押さずに体重をはかる」は終了です。

- 本機に乗ってから約 60 秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。
- 「Err」が表示される場合は、「体重 / OFF」ボタンを押して測定してください。
- すぐに電源を切りたい場合は、「体重 / OFF」ボタンを押してください。

### MEMO 0 リセットについて

本機は、乗るだけで電源が入り測定を開始します。そのため、電源が切れているときに、本機は自動で定期的に「0」にリセットされています (0 リセット)。本機を立てかけたり、本機の上に物を置いた状態で保管すると、0 リセットが正しく行われず、測定時に誤差が出ることがあります。測定値が明らかに違う場合は、以下の操作を行って再度測定してください。

- ① 本機を平らに置く
- ② 「体重 / OFF」ボタンを押す
- ③ 0.00kg が表示される
- ④ 再度、「体重 / OFF」ボタンを押す、電源を切る

## ペットモードでペットの体重をはかる

CA-100

- 

本機を硬く平らな安定した所に置き、「Pet」ボタンを押します。

※「8888」が表示されますので、動かしたり乗ったりしないでください。「Err」が表示されます。
- 

「0.00」表示後、ペットを抱いて本機に乗ります。

※ ペットを抱いて乗る際は、転倒しないよう、ご注意ください。
- 

ピッと鳴り、表示が点滅したら本機から降ります。
- 

「0.00」表示後、ご自分だけで本機に乗ります。


- 

ピッピッと鳴ったら「Pet」が点滅し、ペットの体重が表示されます。

本機から降ります。


約 60 秒後に自動で電源が切れます。

以上で「ペットモードでペットの体重をはかる」は終了です。


- 本機に乗ってから約 60 秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。
- 一緒に乗ったペットとの体重の合計が 150kg を超えると測定できません。「OL」を表示します。
- ペットモードで表示できるペットの体重は 50kg までです。ペットの体重が 50kg を超えると「Err」を表示します。
- すぐに電源を切りたい場合は、「体重 / OFF」ボタンを押してください。

## キャリアーモードで荷物の重さをはかる


HD-664 / HD-665


- 

本機を硬く平らな安定した所に置き、「Carry」ボタンを押します。

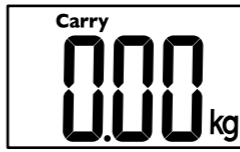
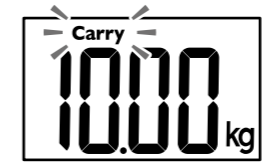
※「8888」が表示されますので、動かしたり乗ったりしないでください。「Err」が表示されます。
- 

「0.00」表示後、荷物を持って本機に乗ります。

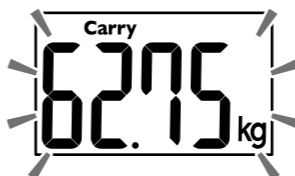※ 荷物を持って乗る際は、転倒しないよう、ご注意ください。
- 

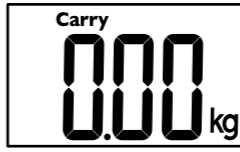ピッと鳴り、表示が点滅したら本機から降ります。
- 

「0.00」表示後、ご自分だけで本機に乗ります。


- 

ピッピッと鳴ったら「Carry」が点滅し、荷物の重さが表示されます。

本機から降ります。

約 60 秒後に自動で電源が切れます。

以上で「キャリアーモードで荷物の重さをはかる」は終了です。

- 本機に乗ってから約 60 秒以内に数値が安定しない場合は自動的に電源が切れます。
- 荷物を持っているときの体重の合計が 150kg を超えると測定できません。「OL」を表示します。
- キャリアーモードで表示できる荷物の重さは 50kg までです。荷物の重さが 50kg を超えると「Err」を表示します。
- すぐに電源を切りたい場合は、「体重 / OFF」ボタンを押してください。

## 保証書

販売店様へ  
ご購入時に本店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ  
本書は、無料修理規定により無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。  
お客様の個人情報は、修理完了品の発送に使用させていただきます。修理品とともにご返却いたします。この間、お客様の個人情報は第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき責任を持って管理いたします。

品名	体重計 CA-100/HD-664/HD-665
保証期間	お買い上げ日より 1 年
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 お名前 お電話 ( ) 様
販売店	店名・所在地 電話 ( )

輸入元 株式会社 **タニタ**

本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2  
ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

お問い合わせ先  
フリーダイヤル **0120-133821**  
携帯電話からはフリーダイヤルに繋がりません。  
携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。  
ナビダイヤル **0570-783551**  
連絡先はお客先担当となりますのでご了承ください。  
受付時間 / 9:00~18:00 (祝日を除く月~金)  
タニタサービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀内字下田茂木添28-1

## アフターサービスについて

- 保証書について  
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
- 修理を依頼されるとき  
●保証期間中は、弊社お客様サービス相談室へお電話にてご連絡のうえ、本機と保証書をお送りください。  
●保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室に連絡の上、本機と保証書をお送りください。
- ご贈答品などで保証書に必要事項が記入していない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
  - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - お買い上げ後の落下等による故障及び損傷
  - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - 一般家庭以外(例えば、業務用としての長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
- 保証書の提示がない場合
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。