

取扱説明書 保証書付

ポケットブルスケール
GRAMIL
KP-130L



本書に記載されているイラストはイメージ図です。

もくじ

安全上のご注意	2	アフターサービスについて	7
充電電池と充電について	3	保証書	7
精度を保つために	4	無料修理規定	8
収納ケースについて	4	各部の名称/付属品	9
本書について	5	主電源を入れる	10
アンケートご協力のお願い	5	初期設定	11
本器の廃棄について	5	通常計量	13
「故障かな?」と思ったら	6	追加計量	14
計量精度	6	充電する	15
仕様	6	設定を変更する	16
		初期化する	16

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要などときにはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

© 2023 TANITA Corporation KP130L7601(5)-23030F

1

本書について

この度は、ポケットブルスケールGRAMILをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書ははかりの基本的な機能のみを説明している取扱説明書です。

以下の機能に関する取扱説明は弊社ウェブサイトをご確認ください。

- ・食事量計量モード
- ・飲水量計量モード



弊社ウェブサイト
https://www.tanita.co.jp/qr135/

本器は専用のスマートフォンアプリと連携してご使用になれます。アプリの使いかたは専用アプリ内のヘルプもしくは、弊社ウェブサイトをご確認ください。

アンケートご協力のお願い

弊社では商品ご購入後のお客様アンケートを実施しております。今後のより良い商品作りの参考にさせていただきますので、ご協力の程よろしくお願ひ申し上げます。(回答時間：5～10分程度)

弊社ウェブサイトの「お客様アンケート」にアクセスし、以下の専用パスワードを入力してご回答ください。

パスワード：*****

アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で粗品をプレゼントいたします。なお、当選者の発表は粗品の発送をもってかえさせていただきます。アンケートの受付は予告なく終了する場合があります。

本器の廃棄について

本器に内蔵されている充電電池はリサイクルできます。本器を廃棄する場合は弊社ウェブサイトをご確認ください。

5

安全上のご注意

	警告 この表示の欄は「死亡または重傷 ^{※1} を負うおそれのある」内容です。		してはけない「禁止」内容です。
	注意 この表示の欄は「傷害 ^{※2} を負うおそれまたは物的損害 ^{※3} が発生するおそれのある」内容です。		「必ず守っていただく」内容です。

※1：重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感電などをさします。
※3：物的損害とは、家屋・家財などへの拡大損害をさします。

警告

- ・ご使用前およびご使用中に本器に異常が確認されたら使用しないでください。異常があるままご使用になると、けがをするおそれや正確に計量できないおそれがあります。
- ・本器や電池を加熱しないでください。本器の変形や電池の発火により、けがや火災のおそれがあります。
- ・分解や改造は絶対にしないでください。破損や感電、けがをするおそれがあります。
- ・すきまや穴に指を入れないでください。また本器を幼児に絶対さわらせてしないでください。けがをするおそれがあります。

注意

- ・水洗いはしない。感電やけがをするおそれがあります。
- ・1カ月以上使用しないときは裏面のRESETボタンを約5秒長押しして主電源を切ってください。充電電池の劣化や液もれのおそれがあります。
- ・手や本器がぬれた状態で本器を取り扱う際はすべらないように注意してください。落下などにより、破損やけがのおそれがあります。

お手入れについて

- ・アルコールや熱湯、ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。汚れたときは、やわらかい布を水または中性洗剤に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。変形や変色のおそれがあります。
- ・食器洗い乾燥機は使用しないでください。

「故障かな?」と思ったら

	ボタンを押しても何も表示されない。	裏面のRESETボタンを約1秒長押しして本器の主電源を入れてください(☞P.10)。主電源が入らない場合は電池残量が少なくなっていることが考えられますので、ワイヤレス充電器でしばらく充電してから再度お試しください。
	「EEEE」または「----」と表示される。	計量範囲をご確認ください。(以下の仕様参照)容器的重さと計量物の重さの合計が計量範囲の上限を超えると「EEEE」、また-100g以下になると「----」が表示されます。
	「Error 10」または「Error 11」が表示される。	過度の衝撃や落下などにより、正確に計量できない状態です。修理が必要ですので、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。
	「Error m」「Error Ch」が表示される。	内部が故障しています。修理が必要ですので、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
	「Error」が表示される。	計量場所の環境をご確認ください。振動や風、電波の影響を受けない場所で計量してください。
	ワイヤレス充電器に載せても充電されない	本器裏面の充電位置マーク(☞)をワイヤレス充電器の中央に合わせて載せてください。
	充電中に本器が熱くなる	本器裏面の充電位置マーク(☞)をワイヤレス充電器の中央に合わせて載せてください。充電位置マーク(☞)の位置がずれていると、充電効率が低下してワイヤレス充電器および本器が発熱することがあります。

その他のエラー表示が出る場合は弊社ウェブサイト(☞P.5)をご確認ください。

計量精度

JIS(家庭用はかり)に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。使用される場合は、はかれた重さに対して右表の範囲まで精度を保証します。

計量範囲	計量精度
0gから500gまで	±2g
500gを超え2000gまで	±3g

(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)

このほかには、家庭で使用していただくためにつくられたものです。品物の売買取引や、公にそのものの目方を証明する場合は、このほかりを使用しないでください。

仕様

計量範囲	0～2000g	電 源	リチウムイオン二次電池
最小表示	1g	電源定格	3.7V 310mAh 1.147Wh
オートパワーオフ	約1分	充電方式	ワイヤレス充電
寸 法	約幅122×高さ8×奥行122mm	時計精度	平均月差±60秒以内(23℃±5℃)
質 量	約250g	付 属 品	取扱説明書(本書)保証書付、収納ケース、クリーニングクロス
通信方式	Bluetooth® Low Energy technology		

・デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
・Bluetoothのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、株式会社タニタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

6

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容を記載しています。ここに示す内容をよくお読みいただき、本器を正しくご使用ください。

充電電池と充電について

警告

- ・火中・水中への投入、加熱、分解、ショートなどしないでください。
- ・高温の場所で保管しないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・分解・改造をしないでください。
- ・発熱・発火・破裂により、けがをするおそれがあります。
- ・本器裏面にメタリック系のシールを貼らないでください。
- ・充電するときは、本器とワイヤレス充電器の間に金属製のものを挟まないでください。
- ・5時間を超えても充電が完了しない場合は充電を停止してください。発熱、発火、やけどのおそれがあります。

- ・充電電池が液もれして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗ってください。目に損傷を与えるおそれがあります。医師にご相談ください。

注意

- ・充電電池が液もれして液が皮膚や衣服に付着したときは、水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれるおそれがあります。

- ・充電する場合はワイヤレス充電器の使用上の注意をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
- ・本器に内蔵されている充電電池はリサイクルできます。本器を廃棄する場合は弊社ウェブサイト(☞P.5)をご確認ください。

3

アフターサービスについて

- 保証書について
保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。
- 修理を依頼されるとき
保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
・保証期間が過ぎているときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本器の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

保 証 書		
販売店様へ	ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項(お買い上げ日、販売店様欄に捺印)をご記入のうえ、お客様にお渡しいたください。	
お客様へ	本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。※お客様の個人情報、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。	
品 名	ポケットブルスケール GRAMIL KP-130L	
保 証 期 間	お買い上げ日より1年	
お買い上げ日	年 月 日	
お 客 様	ご住所	
	お名前	様
	お電話	()
販 売 店	店名・所在地	
	電話	()


精度を保つために

この内容を守らないと正確に計量できないおそれがあります。

- ・充電時以外は、本器をワイヤレス充電器に載せないでください。正確に計量できないおそれがあります。
- ・充電直後は本器が熱を帯びて、正確に計量できないおそれがあります。30分以上放置してからご使用ください。
- ・過度の衝撃や振動を与えないでください。
- ・温度変化の激しい場所で保管しないでください。また、湿気の多い場所や水気のあるところに置かないでください。
- ・10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してからご使用ください。
- ・高温・低温の計量物を直接本器に載せないでください。
- ・平らですべらず、がたのないところでご使用ください。
- ・直射日光の当たる場所や高熱発生器具(電子レンジ・オーブン・ストーブなど)の近くで使用しないでください。
- ・通信機能付きの機器、電磁波を発生する家電製品、および強力な電磁波のある環境では使用しないでください。本器が誤動作して電池寿命に影響を及ぼすおそれや、正確に計量できないおそれがあります。電子レンジやワイヤレス通信機器、および電線、発電所、電波塔などから可能な限り遠くに離れてご使用ください。
- ・0g表示中に粉などをゆっくり少しずつ載せると表示が変化しない場合があります。少し多めに載せて、後から減らしてください。またははかりに載せるスピードを速めにしてください。(目安：載せ始めてから1秒以内に最小表示以上載せる)

収納ケースについて

本器を持ち運ぶ際は付属の収納ケースをご活用ください。

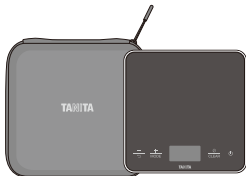

- ・収納ケースは定期的にお手入れし、清潔にご使用ください。収納ケースが汚れた場合は、スポンジかやわらかい布に中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いたやわらかい布で拭いてください。水洗いはしないでください。

4

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本器と保証書をお送りください。
- ご購入品などで保証書に必要事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。
- 保証期間内で次の場合には、有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - 付属品、消耗品の故障および交換
 - 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷
- 保証書の提示がない場合
- 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。



デジタル
クッキング
スケール

経済産業省令
適合マーク



JIS B 7613
JQ0313010




Li-ion00

販売元	株式会社 タニタ
本社・お客様サービス相談室	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2
製造元	株式会社 タニタ 秋田
タニタ サービスセンター	〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1
ホームページアドレス	https://www.tanita.co.jp/
お問い合わせ先	フリーダイヤル 0120-133821 携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。
	ナビダイヤル 0570-783551 通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。
受付時間 / 9:00～18:00 (祝日を除く月～金)	

8

各部の名称/付属品

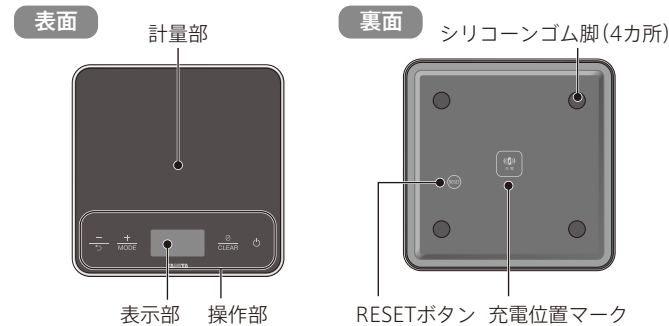


付属品

取扱説明書(本書)保証書付 収納ケース クリーニングクロス

※不足しているものがございましたら、弊社お客様サービス相談室にご連絡ください。

操作部

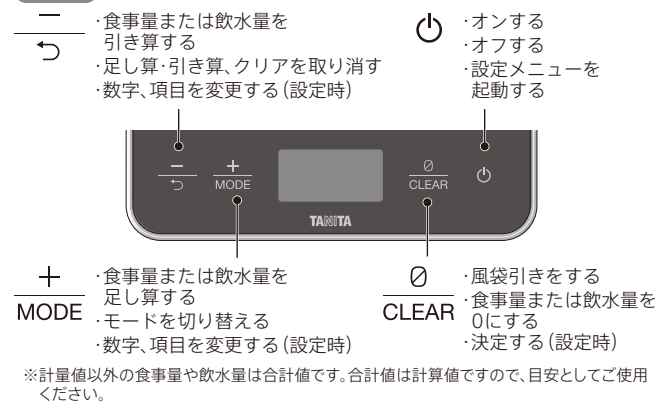


9

通常計量

1. オフ状態で \odot を押すと、「HELLO」が表示されます。
- 安定すると、「0g」が表示されます。
2. 計量物を載せると重さが表示されます。
3. 計量物を降ろします。
4. \odot を押すとオフします。

13

主電源を入れる

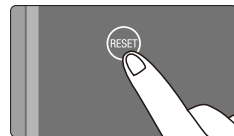

裏面のRESETボタンを約1秒長押しして主電源を入れます。自動的に初期設定画面へ遷移します。

- ・ご購入後は充電が少なくなっている可能性があります。
- ・充電電池が十分に充電されていないと、主電源が入らない場合があります。ワイヤレス充電器でしばらく充電してから再度お試しください。
- ・充電方法については「充電する」(P.15)をご参照ください。
- ・裏面のRESETボタンを約5秒長押しして主電源を切ると、日時および食事量と飲水量の計量データは消去されます。日時は主電源を入れた際に再度設定してください。地域は消去されません。
- ・充電電池の劣化や事故防止のため、1カ月以上使用しないときは裏面のRESETボタンを約5秒長押しして主電源を切ってください。表面の操作部ボタンを押して何も表示されなければ主電源が切れています。
- ・静電気などの外部からの放電によって主電源が切れる場合があります。再度主電源を入れてください。

10

追加計量(風袋引き)

風袋(ふうたい)引きとは、計量中に使う容器など(風袋)の重さを差し引いて計量物の重さだけをはかることをいいます。


1. オフ状態で \odot を押すと、「HELLO」が表示されます。
- 安定すると、「0g」が表示されます。
2. 容器を載せます。
3. $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ を押すと「T」が表示され、容器の重さが差し引かれます。
4. 計量物を載せると計量物の重さだけが表示されます。
5. 容器と計量物を降ろします。
6. \odot を押すとオフします。

・計量中は本器および計量物に触れないでください。正確に計量できません。
・容器の重さと計量物の重さの合計が計量範囲の上限を超えると「EEEE」が表示されます。




14

初期設定

初めてご使用になる際は、必ず地域と日時を設定してください。


1.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で以下の表からお住まいの地域を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。

地域番号	都道府県
1	北海道
2	青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
3	茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
4	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島
5	沖縄

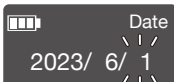2.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「西暦」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。
3.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「月」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。
4.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「日」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。

充電する

本器はワイヤレス充電にのみ対応しています。

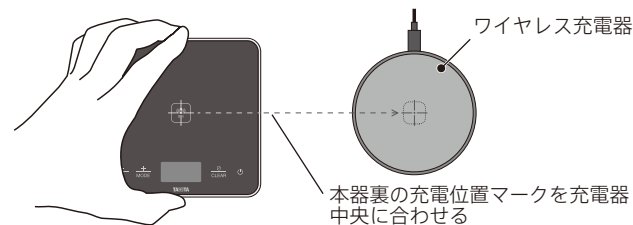


電池残量は4段階で表示されます。充電の目安としてください。「Low Battery」が表示されると計量できません。充電中は電池残量に合わせてマークが点滅表示されます。



- ・充電中はご使用になれません。
- ・ワイヤレス充電器は付属していませんのでご自身でご用意ください。対応ワイヤレス充電器は弊社ウェブサイト(P.5)をご確認ください。
- ・主電源が切れていると、ワイヤレス充電器に載せても何も表示されません。充電できているかどうかはワイヤレス充電器のLEDランプ等でご確認ください。
- ・充電が完全なくなると主電源が切れます。充電後に再度主電源を入れてください。
- ・充電直後は本器が熱を帯びているので、正確に計量できないおそれがあります。30分以上放置してからご使用ください。
- ・満充電で連続約20時間ご使用いただけます。(使用条件により異なります。)
- ・低温環境では電池保護のため、5時間以内に充電が完了しないことがあります。その際は、一度ワイヤレス充電器から降ろして、再度充電してください。
- ・使用しない場合も定期的(1カ月に1回以上)に充電してください。

15


5.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「時間」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。
6.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「分」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。
7.  設定した地域、年月日、時刻が順番に表示され、通常計量画面に遷移します。

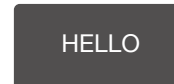

・中止したいときやオフしたいときは \odot を押します。中止した場合、設定値は保存されません。

12

設定を変更する

1. オフ状態で \odot を約2秒長押しします。
2. 設定メニューが表示されます。 $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で変更したい項目を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。



メニュー名	概要
Area	地域番号を設定・変更する
Date	日付を設定・変更する
Time	時刻を設定・変更する
Bluetooth	スマートフォンとペアリングする
Buzzer	ブザー音の有効・無効を変更する
Initialize	お買い上げ時の状態に戻す

各メニューの取り扱いについては、弊社ウェブサイト(P.5)をご確認ください。

・変更が完了したら \odot を押してオフしてください。

初期化する

本器の内部に保存された計量データや設定をすべて消去し、お買い上げ時の状態に戻すことができます。廃棄の際は必ず初期化してください。

1. オフ状態で \odot を約2秒長押しします。
2. 設定メニューが表示されます。 $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「Initialize」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ で決定します。
3.  $\frac{+}{\text{MODE}}$ または $\frac{-}{\text{MODE}}$ で「Execute」を選択し、 $\frac{0}{\text{CLEAR}}$ を押した状態で約3秒以内に $\frac{+}{\text{MODE}}$ を押すと初期化され、自動で主電源が切れます。

16