

専用架台：TM-ST520 取扱説明書

商品コード：TM-ST520
JANコード：4981046714433

このたびは、当社専用架台(TM-ST520)をお買い求めいただき誠に有難うございます。本書は、本製品の組み立て及び当社製ME機器製品(全自動血圧計：TM-2655/TM-2657)の取り付け方法、本製品使用時の注意事項について記述したものです。安全にご使用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。また、本書は大切に保管してください。

正しくお使いいただくために、下記注意事項および使用方法をよくお読みの上ご使用ください。

⚠警告	
⊘	■ 流用の禁止：本製品は、当社製ME機器製品(全自動血圧計：TM-2655/TM-2657)用の専用架台です。指定機器以外に使用しないでください。事故の原因になります。 ■ 改造の禁止：本製品を改造したり、他の用途に使用しないでください。事故の原因になります。


⚠注意	
!	■ 設置の注意：傾斜、振動、衝撃(運搬時も含む)などのない安定した場所に設置してご使用ください。転倒など事故の原因になります。 ■ 使用前の注意：使用前に、ME機器製品(全自動血圧計)の取り付けにガタ、緩みがなく確実に固定されていることを確認してください。ME機器製品(全自動血圧計)の落下など事故の原因になります。 ■ 移動時の注意：移動時はME機器製品(全自動血圧計)の電源プラグを抜き、ケーブル類が移動の際に引っかからないように処理した状態で移動してください。転倒など事故の原因になります。
⊘	■ 本製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。転倒など事故の原因になります。 ■ 本製品を、柔らかいじゅうたん等毛足の長い床面に設置しないでください。転倒など事故の原因になります。

1. 概要及び使用目的

本製品は、当社製ME機器製品(全自動血圧計：TM-2655/TM-2657)を載せるための専用架台です。

2. 部品構成

下記のものがすべて揃っていることを確認してください。

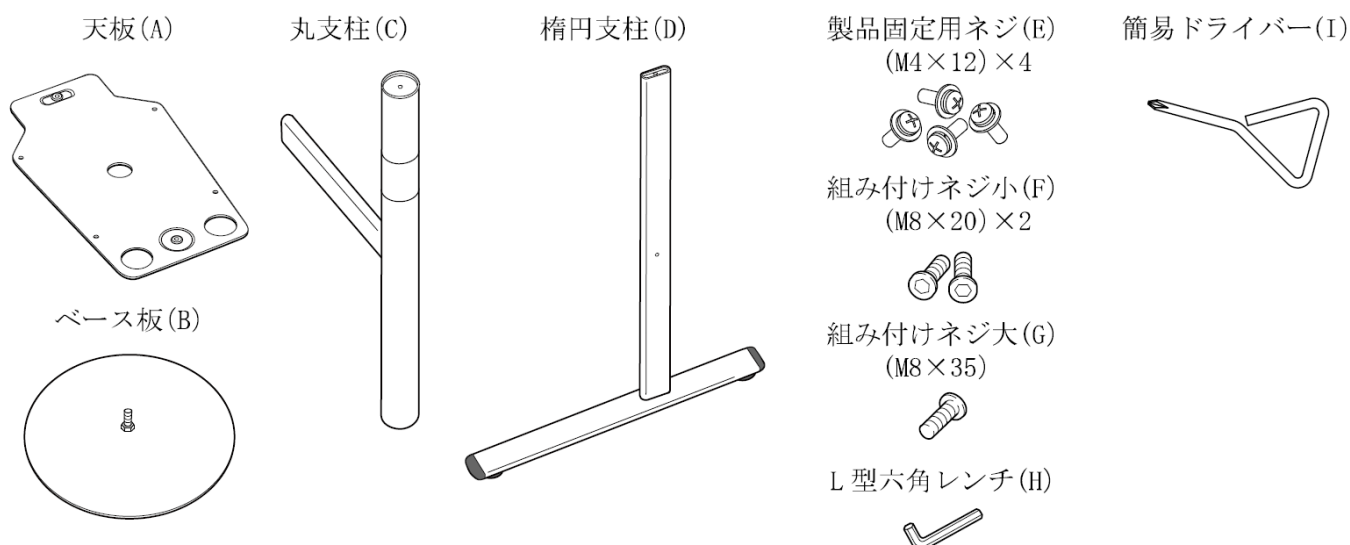

万一、内容物に不足等がございましたらお買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。


3. 組立方法

- 丸支柱(C)をベース板(B)に取り付けます。
注意：丸支柱(C)のネジ穴の大きい方にベース板(B)を取り付けます。

- 楕円支柱(D)を丸支柱(C)に組み付けネジ大(G) (M8×35) で固定します。

※楕円支柱(D)は取り付ける面を反転させることにより、左右の脚の長さを変更できますので、設置場所によって楕円支柱(D)の取り付け方向を選択してください。

- 天板(A)を組み付けネジ小(F) (M8×20) 2本で固定します。

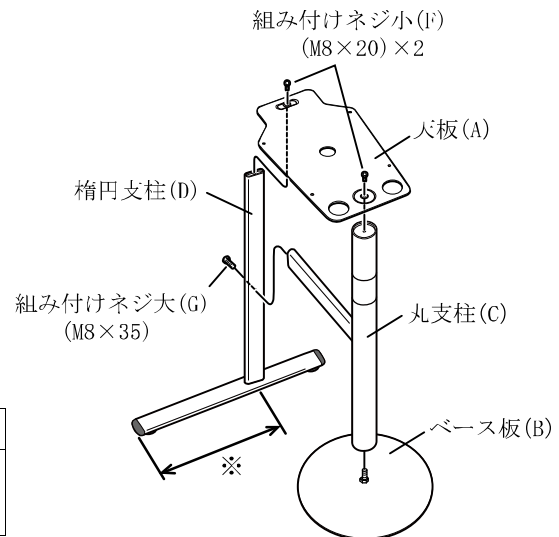

お知らせ

- 組み付けネジ(F)、(G)は付属のL型六角レンチ(H)を使用して締め付けてください。


4. ME 機器製品の取り付け方法

- 本製品の上部(天板)にME 機器製品(全自動血圧計：TM-2655/TM-2657)を載せます。
- 天板下側のネジ穴から製品固定用ネジ(E) (M4×12) を差し込んで、ME 機器製品(全自動血圧計：TM-2655/TM-2657)を強く締め付けて固定します。(4か所)

お知らせ

- 製品固定用ネジ(E) (4本) は、本製品に同梱されています。

- ME 機器製品(全自動血圧計)を架台に取り付け後、取り付けにガタがなく、しっかりと固定されていることを確認します。
※楕円支柱(D)のアジャスタ(2ヶ所)を回すことにより、架台据付のガタツキを調整することができます。

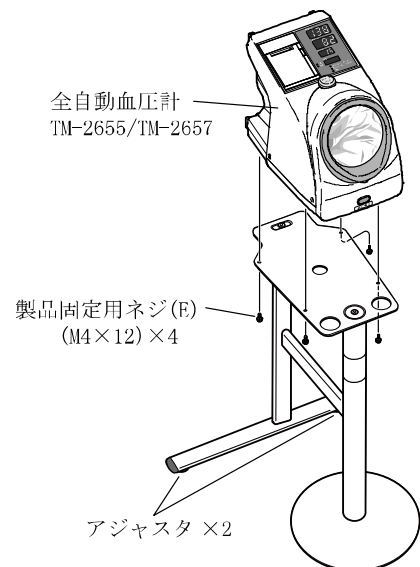

5. お手入れ・点検の方法

- ・水にうすめた中性洗剤を含ませた布、スポンジで汚れを拭き取った後、乾いた布で乾拭きしてください。
- ・塩素系洗剤、シンナ、ベンジン、クレゾール等を使用しないでください。

6. 仕様

架台材質	：	本体／スチール製
架台寸法	：	500(W)×478(D)×640(H) mm
架台質量	：	6.6kg

7. サービス

- 使用方法、故障などご不明な点はME 機器相談センターへお問い合わせください。
- 本書に記載の意匠、仕様及び部品は性能向上のため、一部予告無く変更することがあります。

製造販売業者：株式会社エー・アンド・デイ
住 所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243

メディカル機器に関するご質問・ご相談・修理品 窓口

受付時間：月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）
9:00～12:00 13:00～17:00

AND エー・アンド・デイ 0120-707-188
ME 機器相談センター

修理品の発送先 〒507-0054 岐阜県多治見市宝町 9-19
株式会社エー・アンド・デイ 東海事業所
TEL 0572-21-6644