

RS-232Cケーブル 通信仕様一覧

カテゴリ	品番	接続ケーブル	通信速度	データ長	パリティ	ストップビット	フロー制御
体組成計	MC-180	ストレート(延長用)	4800/ 9600/ 19200 ※1	8bit	なし	1bit	なし/ ハードウェア/ XON/XOFF ※1
	MC-190						
	DC-217A	ストレート(延長用)	9600	8bit	なし	1bit	なし
	DC-250						
	DC-320						
	DC-430A						
	DC-430A-N						
	DC-13C						
	MC-780A						
	MC-780A-N						
	MC-780MA-N						
	DC-270A						
	DC-270A-N						
	BH-100						
BH-200A							
BH-300A-N							
体脂肪計	BC-108	クロス(リバース)	4800	8bit	なし	1bit	なし
	BC-118						
	BF-220						
	TBF-110						
	TBF-016	クロス(リバース)	2400	7bit	偶数	1bit	なし
	TBF-026						
	TBF-215						
	TBF-216						
	TBF-310						
TBF-410							
体重計	WB-510	クロス(リバース)	4800	8bit	なし	1bit	なし
	WB-110	ストレート(延長用)	2400	7bit	偶数	1bit	なし
	WB-150	ストレート(延長用)	9600	8bit	なし	1bit	なし
	WB-260A						
	PW-630						
	PW-650A						
	PH-550A						
ベビースケール	BD-715A	ストレート(延長用)	9600	8bit	なし	1bit	なし
	BD-815						

※1 MC-180/190の通信速度、フロー制御は機器の設定で変更可能

推奨ケーブル 一覧

ストレート(延長用)

メーカー	名称・仕様	品番	
タニタ	専用ストレートケーブル 1.8m	OPC06MF906	※2
サンワサプライ	RS-232C延長用ストレート 2m	KRS-443FM2K	※3
	RS-232C延長用ストレート 2m	KR-9EN2	※3
エレコム	RS-232C延長用ストレート 1.5m	C232N-E9	※3

クロス (リバーズ)

メーカー	名称・仕様	品番
サンワサプライ	RS-232C クロス 1.5m	KRS-403XF1K2
	RS-232C クロス 3m	KRS-403XF3K2
エレコム	RS-232C リバーズ 1.5m	C232R-915
	RS-232C リバーズ 3m	C232R-930

USBシリアル変換

メーカー	名称・仕様	品番	
バッファローコクヨサプライ	USBシリアル変換ケーブル	BSURC0710BS	※3
サンワサプライ	USBシリアル変換ケーブル	USB-CVRS9HN	※3

※2 株式会社タニタの営業担当までご連絡ください。

※3 タニタ製品との接続には、追加でオス・メスのアダプタ(ジェンダーチェンジャー)が必要です。
(サンワサプライ:AD9S-MFK、エレコム:AD-D9MF)