


## スマートフォンのアプリとの接続説明

タニタ手首式血圧計  
BP-215 シリーズ  
BP-218L / BP-219L



タニタ上腕式血圧計  
BP-225 シリーズ  
BP-228L / BP-229L

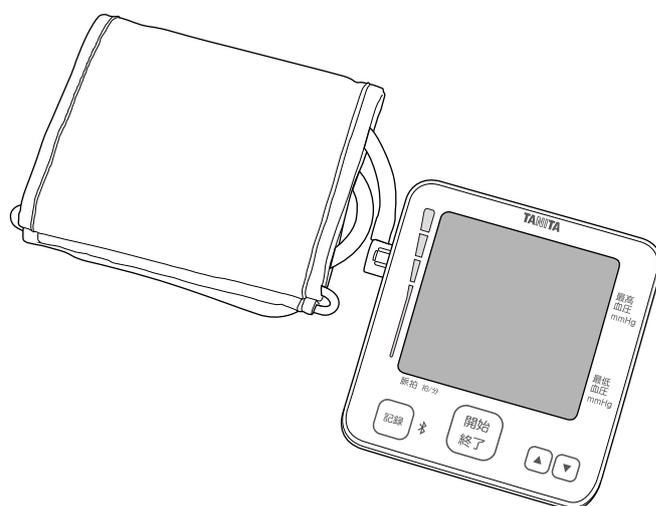

### もくじ

アプリに血圧計を登録する	.....1
アプリに測定結果を送信する	.....5

- ・本書はスマートフォンのアプリとの接続について説明します。その他の基本的な操作方法や注意事項は、本器に付属の取扱説明書をご確認ください。
- ・本書に記載されているイラストはイメージです。
- ・本書の操作説明はBP-228L/BP-229Lのイメージで示しますが、BP-218L/BP-219Lとボタン操作および表示に差異はありません。
- ・デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

# アプリに血圧計を登録する



スマートフォン画面

1. スマートフォンの設定より Bluetooth®をオンにします。
2. アプリ紹介ページにアクセスし、対応するアプリをダウンロードします。

BP-218L  
<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-218L>

BP-219L  
<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-219L>

BP-228L  
<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-228L>

BP-229L  
<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-229L>

アプリに対応するスマートフォン一覧は、あらかじめ上記のページからご確認ください。



アプリ画面

3. アプリを起動したあと、「新規会員登録」から会員登録してください。

- ・スマートフォンを買い替えた場合は、本器を登録しなおしてください。
- ・からだカルテ会員の方はお使いのIDでログインしてください。

「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

# アプリに血圧計を登録する(つづき)



アプリ画面

4. 登録完了後、登録したIDでログインします。



5. 「データを入力」をタップします。



「血圧」をタップします




「設定する」をタップします。



登録したい血圧計を選択します。

アプリ画面

# アプリに血圧計を登録する(つづき)

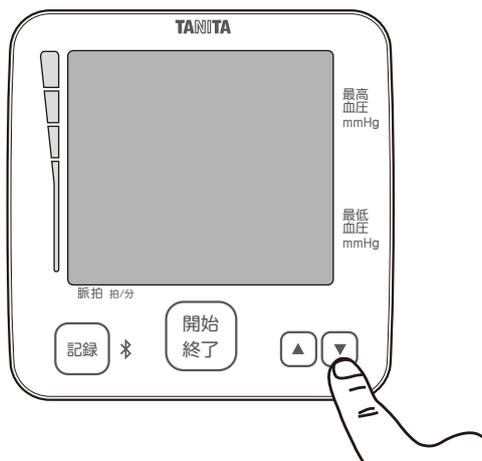


イラストはBP-228L/BP-229Lのイメージです。

BP-218L/BP-219Lも同様に[▼]ボタンを操作します。

## 6. 本器の電源が切れていることを確認し、[▼]ボタンを約3秒長押しします。

- ・通信環境によっては本器との接続に数秒かかる場合があります。
- ・通信距離の目安は、見通しのよい場所で5mほどです。

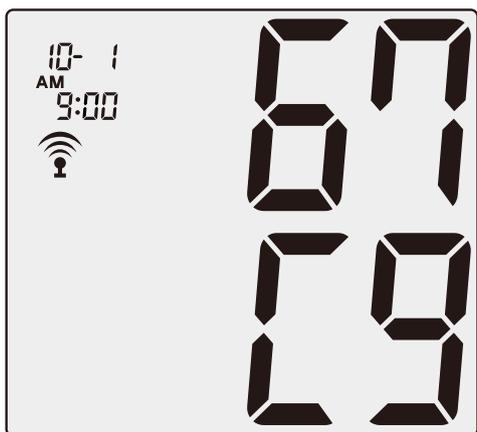

例) 認証コードが「67C9」の場合

## 7. 本体の表示部に、認証コードが2段で表示されます。

- ・認証コードは以下の文字を用いて本体表示部に表示されます。

0 123456789ABCDEF

アプリ側では、それぞれ以下のように対応します。

0123456789ABCDEF

- ・スマートフォンと本器の通信中は、本体の表示部に📶マークが点滅します。

# アプリに血圧計を登録する(つづき)



アプリ画面

## 8. 血圧が選択されている状態で、「血圧計を登録する」をタップします。

- ・通信環境によっては本器との接続に数秒かかる場合があります。
- ・通信距離の目安は、見通しのよい場所で5mほどです。




アプリ画面

## 9. 登録したいユーザー番号に従って「1」か「2」をタップして、本器を登録します。


- ・アプリに本器が登録されると、本器の日時はスマートフォンの日時に同期されます。

登録が完了すると「読み取り開始」の状態になります。引き続き、アプリに測定結果を送信することができます。


# アプリに測定結果を送信する

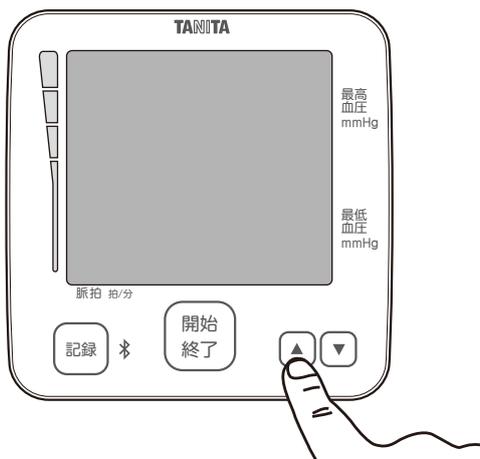


1. 本器の電源が切れているときに[▲]ボタンまたは[▼]ボタンを押します。

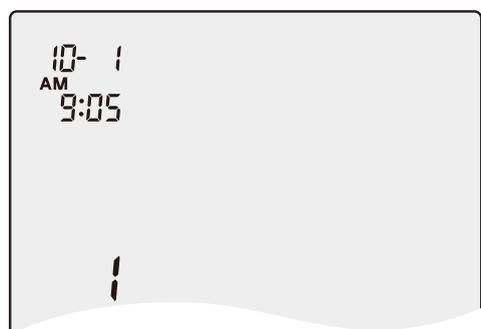

ユーザー番号が表示されるので、[▲]ボタンまたは[▼]ボタンで測定結果を送信したいユーザー番号を選択します。  
ボタンを押さずに約3秒経つと、自動的に電源が切れます。

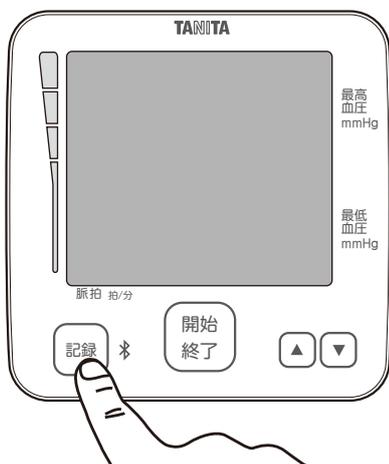

2. 本器の電源が切れていることを確認し、[記録]ボタンを押します。

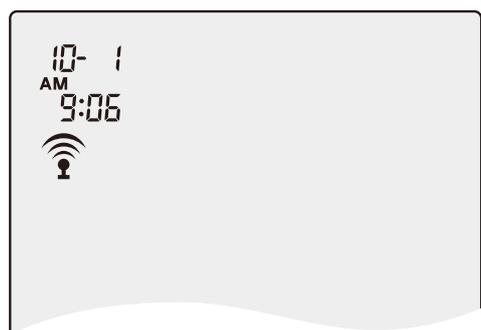

- ・測定結果が記録されていないときは、[記録]ボタンを押してもWi-Fiマークが表示されません。
- ・選択したユーザー番号に保存されているすべての測定結果がアプリに送信されます。測定結果を選択して送信することはできません。
- ・通信を開始する前はWi-Fiマークが点滅し、通信中はWi-Fiマークが点灯します。
- ・データ転送が中断されると、データが失われるおそれがありますのでご注意ください。

# アプリに測定結果を送信する(つづき)



アプリ画面

3. アプリを起動させて、「データを入力」、「血圧」、「血圧計から入力する」に進み、「読み取り開始」をタップします。



4. 読み取りが完了すると「データ入力完了しました」と表示され、送信した測定結果を見ることができます。

- ・本器に保存されている測定結果は、アプリへの送信が完了すると削除されます。送信が完了したあとは、アプリから測定結果をご確認ください。
- ・登録したユーザー番号と異なるユーザー番号で読み取りをしたとき、アプリでエラーが表示されます。ユーザー番号を選択しなおして、再度読み取りをしてください。(P.5)