

非検定品

取引証明以外用

簡単・速い！ 靴のまま体組成を測定可能

店舗や企業、イベント会場での測定にお勧め

- 全身の体組成を約10秒で測定可能。
- 両手間のインピーダンスから全身の体組成を評価。
- 測定結果は内蔵プリンターから印刷可能。
- USBポート・RS-232Cポートを標準装備、外部入出力が可能。
- 測定データを自動でSDカード(別売)にCSV保存。



靴を脱がずに
両手で握るだけ



DC-13C 主な特長



グリップは180度回転



靴のままはかれるので実測時間が早い(全身の体組成が約10秒)




1人でも測定可能なわかりやすい操作部、測定結果は内蔵プリンターで印刷可能



SDカード(別売)に測定データを保存可能

USBポート・RS-232Cポートが標準装備で外部入出力可能

企業内での社員の健康管理、自治体やイベントでの測定に

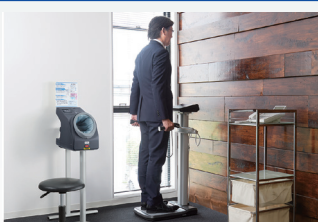

プリントアウト例

TANITA	
DC-13C	
2018/04/01 (日) 10:10	氏名
入力項目	0000000000000001
ID	スタンダード
性別	男性
年齢	37才
身長	170.3 cm
着衣量 (PT)	1.0 kg
測定結果	
体重	69.8 kg
体脂肪率	12.8 %
脂肪量	8.9 kg
除脂肪量	60.9 kg
筋肉量	57.7 kg
筋肉率	82.7 %
体水分量	45.8 kg
体水分率	65.6 %
推定骨量	3.2 kg
基礎代謝量	1693 kcal
内臓脂肪レベル	7
BMI	24.1
標準体重	63.8 kg
肥満度	9.4 %
体組成判定	
11.0 ~ 21.9 %	
7.5 ~ 17.1 kg	
目標体脂肪率	
2.0 %	
体脂肪率	
やせ 標準 軽肥満 肥満	
BMI	
やせ 標準 肥満1 肥満2	
内臓脂肪レベル	
標準 やや過剰 過剰	
筋肉量	
少 平均 多	
基礎代謝レベル	
燃えにくい 標準 燃えやすい	
体脂肪率と筋肉量による体型判定	
☆筋肉質☆	
インピーダンス情報	
* 6.25kHz	50kHz
57.7, 9	49.7, 5
-34.1	-51.0
	R
	X

仕様

インピーダンス測定部	基礎データ※1	4C法
	測定方法	デュアル周波数(2周波数)
	測定周波数	6.25、50kHz
	測定電流	500μA以下
	電極材質	ABSメッキ
	測定部位	全身
体重測定部	ひょう量(最大計量)	200kg
	目量(最小表示)	0.1kg(2.0~100.0kg) / 0.2kg(100.0~200.0kg)
表示部		セグメントLCD
外部インターフェイス		USBポート、RS232Cポート
電源		ACアダプター(DC12V 3A)
消費電力		36W
使用条件	温度範囲	5~35℃
	湿度範囲	30~80%(結露なきこと)
主な付属品		ACアダプター、プリンター用紙1巻、マット3枚、結果解説ポスター、組み立てガイド、電源コード、操作手順ガイド
製造国		日本
メーカー希望小売価格		¥298,000(税抜)

※1 全身の脂肪量、筋肉量における基礎データ。

専用プリンター用紙4巻セット

品番	2903
メーカー希望小売価格	¥3,000(税抜)

交換用マット(10枚入り)

品番	OP-600
メーカー希望小売価格	¥6,000(税抜)

△ 体組成計は、測定に際して微弱な電流を流しますので、ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は使用しないでください。

測定モード別仕様

入力項目	体組成計モード		体重計モード
	着衣量(風袋引き量)	0.0~10.0kg(0.1kg単位)	○
	ID	0~9999999999999999(16桁)	○
	体型	スタンダード / アスリート	—
	性別	男性 / 女性	—
	年齢	6~99才(スタンダード)/18~99才(アスリート)	—
	身長	90.0~249.9cm	—
	目標体脂肪率	4~55%(1%単位)	—
	体重	0.1kg単位/0.2kg単位※2	○
	体脂肪率	0.1%単位(3.0~75.0%)	—
出力項目	脂肪量	0.1kg単位/0.2kg単位※2	—
	除脂肪量	0.1kg単位/0.2kg単位※2	—
	筋肉量	0.1kg単位/0.2kg単位※2	—
	筋肉率	0.1%単位	—
	体水分量	0.1kg単位/0.2kg単位※2	—
	体水分率	0.1%単位	—
	推定骨量	0.1kg単位※3	—
	基礎代謝量※4	0~9999kcal/日	—
	内臓脂肪レベル※4	1~59レベル	—
	BMI	0.1単位	—
	ローレル指数(17才以下)	0.1単位※3	—
	標準体重※4	0.1kg単位※3	—
	肥満度※4	0.1%単位※3	—
	判定/グラフ	体脂肪率/BMI※4/内臓脂肪レベル※4/筋肉量※4/基礎代謝レベル※4/体型判定※4	—
	インピーダンス	リアクタンス、レジスタンス	—


※2 測定値が100kg以上の場合。

※3 印字のみ。

※4 17才以下で測定した場合、この項目は、表示、プリントアウト、出力されません。

寸法図(単位:mm)

質量:約12kg
ACアダプターケーブル長さ:約3.4m

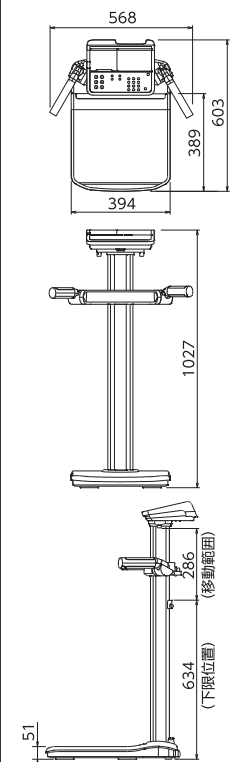

※寸法は概略です。

株式会社 タニタ

本 社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所	〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2	03(3558)8111(代表)	FAX03(3558)0335
大阪営業所	〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15	06(6784)2811(代表)	FAX06(6784)2778
名古屋営業所	〒465-0072 愛知県名古屋市中区東区牧原2-707	052(704)2201(代表)	FAX052(704)2221
福岡営業所	〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6	092(575)5761(代表)	FAX092(575)5617
北日本営業所	〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-8	022(299)7161(代表)	FAX022(299)7163

(株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添2-1

お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 ナビダイヤル(有料) ☎0570-099655 受付時間9:00~17:00(祝日を除く月~金)

©2025 TANITA Corporation

(株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。

<https://www.tanita.co.jp/>

◎表示価格をはじめ、このカタログの内容は2025年10月現在のものです。 ◎商品のデザイン・仕様・価格は変更になることでもありますのでご了承ください。
◎商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。