


TANITA

スマートフォンのアプリとの接続説明

タニタ上腕式血圧計

BP-224L / BP-A24L

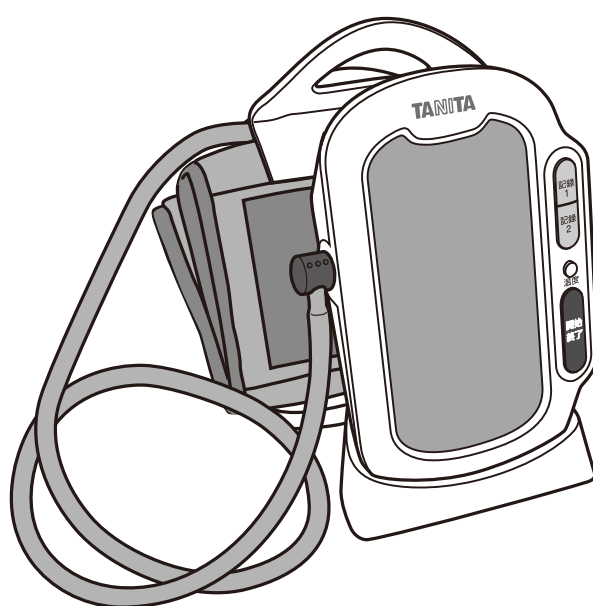

もくじ

| | |
|--------------------|---|
| アプリに血圧計を登録する…………… | 1 |
| アプリに測定結果を送信する…………… | 5 |
| 故障かな?と思ったら…………… | 7 |

- ・本書はスマートフォンのアプリとの接続について説明します。その他の基本的な操作方法や注意事項は、本器に付属の取扱説明書を確認してください。
- ・本書に記載されているイラストはイメージです。
- ・デザインおよび仕様は予告なく変更する場合があります。

アプリに血圧計を登録する



スマートフォン画面

1. スマートフォンの設定より Bluetooth® をオンにします。
2. アプリ紹介ページにアクセスし、対応するアプリをダウンロードします。

BP-224L

<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-224L/>

BP-A24L

<https://www.tanita.co.jp/support/manual/BP-A24L/>

アプリに対応するスマートフォン一覧は、あらかじめ上記のページから確認してください。



アプリ画面

3. アプリを起動したあと、「新規会員登録」から会員登録してください。

- ・スマートフォンを買い替えた場合は、本器を登録しなおしてください。
- ・からだカルテ会員の方はお使いのIDでログインしてください。

「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

アプリに血圧計を登録する(つづき)



アプリ画面

4. 登録完了後、登録したIDでログインします。



5. 「データを入力」をタップします。



「血圧」をタップします。




「設定する」をタップします。




登録したい血圧計を選択します。

アプリ画面

アプリに血圧計を登録する(つづき)

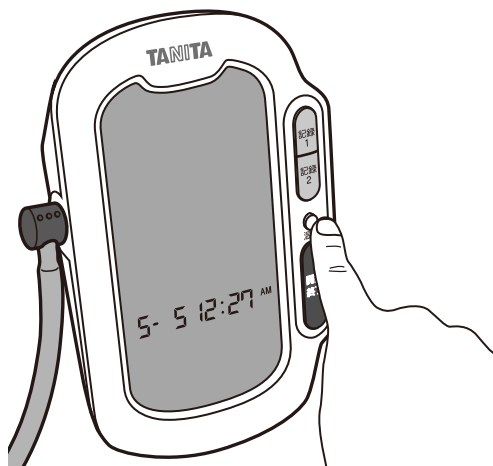

6. 本器が時計モードであることを確認し、
[温度表示]ボタンを3秒以上長押しします。

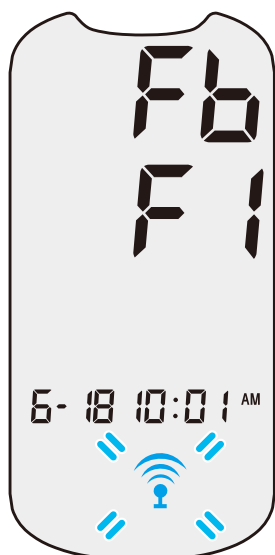

7. 本器の表示部に、認証コードが2段で表示されます。

・認証コードは以下の文字を用いて本器表示部に表示されます。


0 123456789ABCDEF

アプリ側では、以下のように表示されます。

0123456789ABCDEF

・スマートフォンと本器の通信中は、本器の表示部にWi-Fiマークが点滅します。

例) 認証コードが「FbF1」の場合

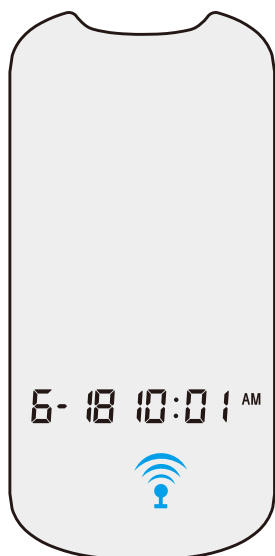

アプリに血圧計を登録する(つづき)



アプリ画面

8. 血圧が選択されている状態で、「血圧計を登録する」をタップします。

- ・通信環境によっては本器との接続に数秒かかる場合があります。
- ・通信距離は見通しのよい場所で約5mです。



アプリ画面

9. 登録したいユーザー番号にしたがって記録1または記録2をタップして、本器を登録します。


記録1で登録したアプリはメモリー1のデータを、記録2で登録したアプリはメモリー2のデータを受け取れます。

- ・アプリに本器が登録されると、本器の日時はスマートフォンの日時に同期されます。

登録が完了すると「読み取り開始」の状態になります。引き続き、アプリに測定結果を送信することができます。

例)「記録1」を登録する場合

アプリに測定結果を送信する

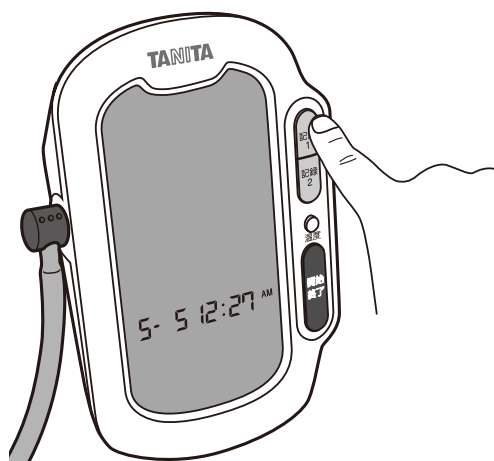


メモリー1の測定結果を送る

1. 本器が時計モードのときに、[記録1]ボタンを押します。

メモリー1の測定結果は、記録1で登録しているアプリに送信することができます。

メモリー1の測定結果を、記録2で登録したアプリに送信することはできません。

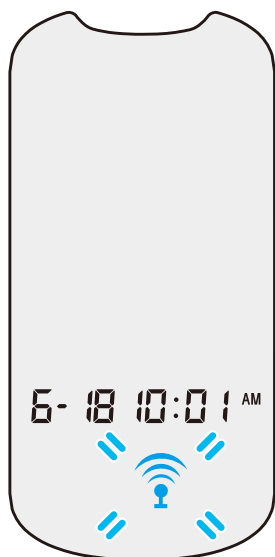

- ・選択したメモリー番号に保存されているすべての測定結果がアプリに送信されます。測定結果を選択して送信することはできません。
- ・スマートフォンと本器の通信中は、本器の表示部にWi-Fiマークが点滅します。



アプリ画面

2. アプリを起動させて、「データを入力」、「血圧」、「血圧計から入力する」に進み、「読み取り開始」をタップします。

- ・測定結果が記録されていないときは、[記録]ボタンを押してもWi-Fiマークが表示されません。
- ・データ転送が中断されると、データが失われるおそれがありますので注意してください。
- ・送信データが多い場合、時間がかかることがあります。

アプリに測定結果を送信する(つづき)

| データ入力完了画面 | |
|-----------|-----------------|
| 日付 | 9月10日(火) 09:33 |
| 最高血圧 ↑10 | 130 mmHg |
| 最低血圧 ↑4 | 85 mmHg |
| 脈拍 ↑8 | 90 拍/分 |

この入力を取り消す

続けて入力する

3. 読み取りが完了すると「データ入力完了しました」と表示され、送信した測定結果を見ることができます。

- ・本器に保存されている測定結果は、アプリへの送信が完了すると削除されます。送信が完了したあとは、アプリから測定結果を確認してください。
- ・登録したユーザー番号と異なるユーザー番号で読み取りをしたとき、アプリでエラーが表示されます。ユーザー番号を選択しなおして、再度読み取りをしてください。(P.5)

故障かな?と思ったら

| 症状 | 原因 | 対処法 |
|-------------------|--|--|
| 本器とスマートフォンが接続できない | 本器とスマートフォンが離れすぎている | 本器とスマートフォンを近づけてください。 通信距離は見通しのよい場所で約5mです(☞P.4)。 |
| | スマートフォンの「Bluetooth」がオンになっていない | スマートフォンの設定よりBluetoothをオンにしてください(☞P.1)。 |
| 測定結果が送信できない | アプリに血圧計が登録されていない | 測定結果を送信する前にアプリに血圧計を登録してください(☞P.2)。 |
| 測定結果が本器に保存されていない | すでに測定結果をアプリに送信している | アプリに送信済みの測定結果は本器から削除されます(☞P.6)。 |
| 日時設定が変更されている | スマートフォンと連携して使用すると、本器の日時はスマートフォンの日時に同期される | スマートフォンの日時設定を確認してください(☞P.4)。 |

※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、株式会社タニタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

| | |
|--|--|
| 発売元 株式会社 TANITA | |
| 本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 | |
| 製造販売元 株式会社 TANITA 秋田 | |
| タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1 | |
| ホームページアドレス https://www.tanita.co.jp/ | |
| お問い合わせ先 | フリーダイヤル  0120-133821 <small>携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。 携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。</small> |
| | ナビダイヤル  0570-783551 <small>通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。</small> |
| 受付時間 / 9:00~17:00 (祝日を除く月~金) | |